

Voor service en advies (NL):
T: 0475 589 302
E: info@varodem.nl

Voor bestellen:

E: info@varodem.nl

Volg onze officiële kanalen:



www.varodem.nl

Hulp nodig? Neem contact met ons op voor advies.

Confectiemaattabellen

VaroCare / TinkFit

2021

VARODEM®



Maattabellen

Met dit maattabellenboekje heeft u een handig en overzichtelijk hulpmiddel in handen om de juiste keuze te maken uit ons VaroCare en TinkFit assortiment.

U treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook alle beschikbare modellen, opties en kleuren worden benoemd.

De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters weergegeven.


Heeft u aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer **0475 589302** of mail ons op het e-mailadres **info@varodem.nl**. Bezoek ook eens onze website www.varodem.nl of volg ons op **social media**.

Toepasbaarheid

VaroCare en TinkFit worden ingezet bij chronisch oedeem (langer dan drie weken) voor reductie of consolidatie (i.p.v. TEK). VaroCare kan eventueel aangevuld worden met VaroSilk hand- of teenverband, VaroCombi voetverband, TG softliners of de AD liners.

Voor links en rechts

	XS	S	M	L	XL
cA (omvang voorvoet)	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34	35 - 40
lA normaal	16,5	18	19,5	21	23
lA lang	18,5	20	21,5	23	25

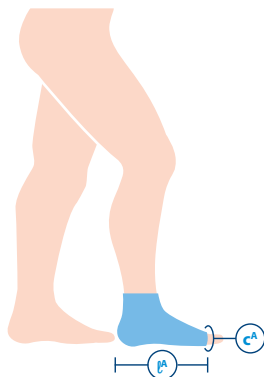

Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig)

- cA: de omvang van de voorvoet bij de implant van de tenen.
- lA: lengte van de voet, gemeten aan de binnenzijde van de voet, van hak tot implant tenen.

Tip


Bij het VaroCare voetverband wordt standaard een extra band meegeleverd. Met deze extra band kunt u extra druk geven rond de enkels of op de voetrug, kunt u vocht pockets rondom de enkel liften en kunt u eventuele vensters overbruggen tussen voet- en onderbeenverband. De klittenbanden worden los meegeleverd aangezien het voetverband voor zowel links als rechts is. U dient deze zelf aan het verband te bevestigen zodat het klittenband naar de buitenzijde van de voet sluit.

VaroCare voetverband, Lite en Strong



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cB (omvang enkel)	20 - 27	25 - 32	30 - 38	37 - 44	45 - 52
cC (omvang kuit)	35 - 45	40 - 52	48 - 60	55 - 65	60 - 70
lD normaal	37	37	42	42	44
lD lang	42	42	47	47	49

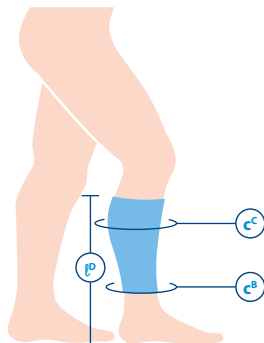

Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)

- cB: de omvang van de enkel (smalste omvang onderbeen)
- cC: omvang van de kuit (grootste omvang onderbeen)
- lD: lengte van de grond tot twee vingers uit de knieholte

Tip

Het VaroCare onderbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner, een siliconenband en een contrasterende band op de kuit.

Bestel waar nodig de volgende accessoires:


- Verlengband: indien de lD langer is dan de langste lengtemaat
- VaroLiner: een onderkous voor onder het onderbeenverband voor een kwetsbare of beschadigde huid.

VaroCare onderbeenverband, Lite en Strong



Voor links en rechts

	XS	S	M	L	XL
cD (omvang onder knie)	35 - 42	40 - 49	48 - 57	55 - 62	60 - 67
cF (omvang 10 ^{cm} boven patella)	40 - 52	50 - 62	60 - 72	70 - 82	85 - 97
lengte	20	24	28	32	36

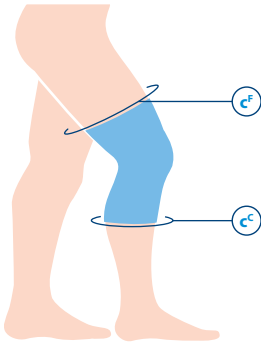

Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig) (standaard lengte)

- cD: omvang 2 cm onder de knie
- cF: omvang 10 cm boven de patella

Tip


Het VaroCare knieverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. De klittenbanden worden los meegeleverd aangezien het knieverband zowel links als rechts te dragen is. U dient deze zelf aan het verband te bevestigen zodat het klittenband naar de buitenzijde van het been sluit. Het knieverband kan uitstekend gecombineerd worden met een korte therapeutische elastische kous. De lengte van het knieverband is automatisch meegenomen in de omvangsmaat.

VaroCare knieverband, Lite en Strong



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cF (omvang 10 ^{cm} boven patella)	45 - 52	53 - 59	60 - 66	67 - 73	74 - 80
cG (grootste omvang)	50 - 65	60 - 75	70 - 80	75 - 90	85 - 100
l EG normaal	23	23	23	23	23
l EG lang	29	29	29	29	29

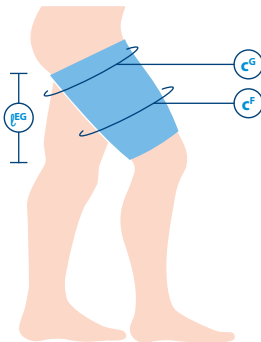

Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)

- cF: omvang 10 cm boven de patella
- cG: omvang twee vingers uit de bilplooi
- l EG: lengtemaat van de bovenzijde knieschijf tot de lies gemeten aan de binnenzijde van het been.

Tip


Het VaroCare bovenbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. Bestel waar nodig een heupband of anti-slipverband, dit voorkomt het eventuele afzakken van een bovenbeenverband.

VaroCare bovenbeenverband, Lite en Strong



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cC (omvang pols)	14 - 16	17 - 19	20 - 22	23 - 25	24 - 27
cE (omvang elleboog)	23 - 26	26 - 30	29 - 34	33 - 39	38 - 42
cG (omtrek bovenarm)	25 - 28	29 - 33	34 - 39	40 - 45	46 - 50
ℓCG normaal	42 - 47				
ℓCG lang	46 - 50				

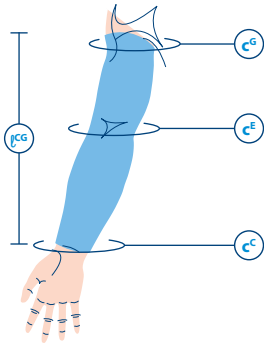

Aanmeten juiste confectiemaat (vier maten nodig)

- Leg de arm in een lichtgebogen positie op een tafel.
- cC: de omvang van de pols. Meet hier niet te strak.
 - cE: de omvang van de elleboog in licht gebogen positie
 - cG: omvang twee vingers uit de oksel.
 - Lengtemaat van de pols tot de G, gemeten aan de binnenzijde van de arm.

Tip


Het VaroCare armverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. Bestel bij het armverband de eerste keer altijd een VaroSilk handverband mee om eventuele backflow richting te vingers te voorkomen.

VaroCare armverband, Lite



voor links en rechts

	XS	S	M	L
cA (omvang implant vingers)	< 18	18 - 20	20 - 22	> 22

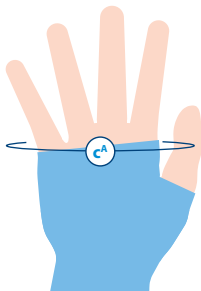

Aanmeten (één maat nodig)

- Leg voor het meten de hand met de handplam plat op tafel.
- cA: omvang bij de implant van de vingers

Tip

Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend gecombineerd worden. VaroCare handverband Lite is tevens geschikt om te dragen over een gebreide compressiehandschoen.


Het VareCare Lite handverband is standaard voorzien van een pelottenset om extra druk op de handrug te kunnen geven. De meegeleverde pelotten kunt u naar wens op maat knippen. Er worden twee verschillende pelotten meegeleverd, een van 2,5 mm dik en een van 5 mm dik.

VaroCare handverband, Lite



voor links en rechts

VaroSilk handverband	XS	S	M	L
cA (omvang aanzet vingers)	< 18	18 - 20	20 - 22	> 22
cB (omvang handpalm)	< 19	19 - 21	21 - 23	> 24

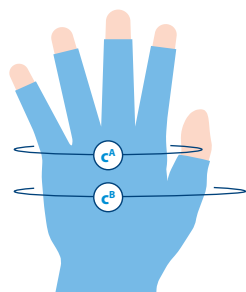

Aanmeten (twee maten nodig)

Leg voor het meten de hand met de handpalm plat op tafel.

- cA: omvang bij de inplant van de vingers
- cB: omvang net boven de duiminplant en over de handrug.

Tip


Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend gecombineerd worden. De lengte van de vingers van het VaroSilk verband kunt u zelf op de juiste lengte afknippen. Trek het handverband aan en zet een streepje op het verband halverwege de nagels. Trek vervolgens het handverband uit en knip ter hoogte van het streepje af.

VaroSilk, Handverband



voor links en rechts

VaroSilk teenverband	XS	S	M	L
cA (omvang voorvoet)	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

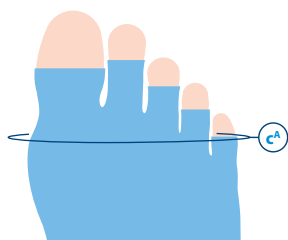

Aanmeten (één maat nodig)

- cA: omvang van de voorvoet bij de inplant van de tenen gemeten.

Tip

De lengte van de tenen van het VaroSilk verband kunt u zelf op de juiste lengte afknippen. Trek het teenverband aan en zet een streepje op het verband halverwege de teennagels.

Trek vervolgens het teenverband uit en knip ter hoogte van het streepje af. VaroSilk is voorbereid voor de rechervoet. Indien het verband links gedragen wordt, keer het verband binnenstebuiten. Zorg ervoor dat de naad altijd over de bovenzijde van de voet loopt.

VaroSilk, Teenverband



VaroCombi voetverband hybrid (voor compressie op de voet)



	S	M	L
cA (omvang voorvoet)	19 - 22	22,5 - 24,5	25 - 28



VaroLiner buisverband anti-bacterieel been



	S/M	L/XL
Kuit	< 50 cm	> 50 cm



VaroLiner buisverband anti-bacterieel arm



	S	M	L
cG (omvang bovenarm)	25 -33	34 - 45	46 - 52
cC (omvang pols)	14 - 19	20 - 25	24 - 28




VaroLiner TG soft (AD of AG)



VaroLiner TG soft	S	L
AD	V	
AG		V



VaroBand	Afmetingen
VaroBand anti-slipverband beige en zwart	12 x 115 cm
VaroBand midlineverband smal (maat 1)	12 x 150 cm
VaroBand midlineverband breed (maat 2)	20 x 150 cm

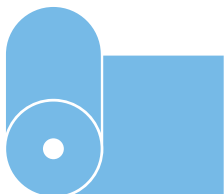

VaroBand antislipverband

Het anti-slipverband is een ultra korte-rek verband welke ingezet kan worden bij het fixeren van de VaroCare verbanden. Het anti-slipverband heeft een griplaag en is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping.

VaroBand midlineverband

Het midlineverband zijn ultra korte-rek verbanden die worden ingezet bij het behandelen van oedemen in het midline gebied (bijv. thorax, genitaliën en/of buik).

VaroBand



	Afmetingen
VaroCare onderbeenverlenger Lite <i>Indien de lengte van een onderbeenverband lite niet toereikend is.</i>	9 x 60 cm
VaroCare onderbeenverlenger Strong <i>Indien de lengte van een onderbeenverband strong niet toereikend is.</i>	12 x 60 cm
VaroCare heupband <i>Ter voorkoming van het afzakken van een bovenbeenverband.</i>	uni
Fibrose Pad square (diffuse werking) <i>Voor het plaatselijk verhogen van de druk onder een compressiehulpmiddel.</i>	20 x 29,5 cm
Fibrose Pad line (sturende werking) <i>Voor het plaatselijk verhogen van de druk onder een compressiehulpmiddel.</i>	20 x 29,5 cm
VaroCare velcroset zwart (zelf op maat te knippen) <i>Let op! Deze set wordt niet vergoed</i>	n.v.t.

Accessoires

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
cT	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125
cH	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135	135 - 145
cG	43 - 56	47 - 62	51 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
cF	43 - 53	47 - 59	51 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	30 - 37	32 - 40	35 - 45	37 - 47	39 - 48	44 - 54
cD	28 - 34	30 - 37	34 - 41	37 - 45	39 - 47	39 - 50
cC	27 - 37	29 - 40	33 - 45	36 - 49	39 - 51	42 - 54
cB1	22.5 - 29	25 - 31	27.5-33.5	30 - 37	33 - 40.5	36 - 43.5
cB	18 - 20	19 - 22	21 - 24.5	23.5 - 27	26 - 30	29 - 33

Aanmeten


Voor het kiezen van de juiste confectiemaat heeft u een aantal omvangsmaten nodig. Meet de maten terwijl de patiënt staat. Er zijn geen lengtematen nodig.

- cB: omvang smalste punt, enkel
- cB1: omvang bij overgang achillespees
- cC: omvang breedste punt op de kuit
- cD: omvang twee vingers uit de knieholte
- cE: omvang knie, schuin meten vanuit de knieholte bovenlangs over de patella (knie-schijf)
- cF: omvang 10-15 cm boven de patella
- cG: omvang twee vingers onder de bilplooi
- cH: omvang breedste punt van de heup
- cT: omvang taille


Tip

TinkFit Compressiebroeken zijn verkrijgbaar in confectiemaat. Mocht de maattabel niet toereikend zijn, dan kunt u uitwijken naar een andere compressiebroek genaamd Curetex onderlichaambandages. Curetex wordt naar maat gemaakt en heeft andere producteigenschappen. TinkFit is een product met veel lengte- en breedterek. Goede aantrekinstructies en kracht bij het aantrekken van het product is noodzakelijk.


Modellen

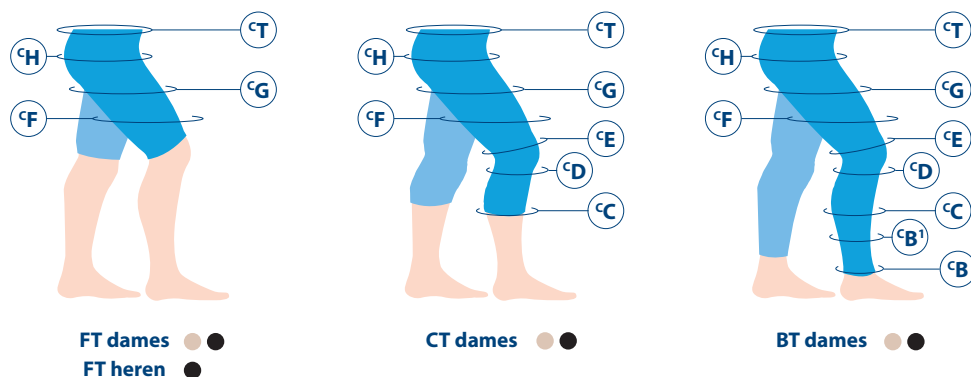

Toelichting modellen VaroPad been en genitaal

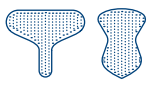Model	Toelichting
	Beenbandageset onderbeen confectie/maat (V830) - Verkrijgbaar in vijf maten of naar maat.
	Beenbandageset onderbeen universeel (V831) - Universele maatvoering incl. een twee malleolus pads. Zelf op de juiste lengte knippen. Met klittenband verstelbaar.
	Beendandageset gehele been naar maat (V830) - Verkrijgbaar naar maat, inclusief twee malleolus pads en een kniepad.
	Genitaal pad vrouw (V839) of man (V840) - Verkrijgbaar in drie confectiematen. Ook te bestellen naar maat. Te gebruiken onder een compressiebroek.
	Kniepad (V845) - Universele maatvoering, per stuk, afmeting 13 x 17 cm, te gebruiken in de knieholte.
	Malleolus pads (843) - Universele maatvoering, per paar, afmeting 6,5 x 9 cm, te gebruiken in de enkelcoulissen om lokaal extra druk te geven.

Toelichting modellen VaroPad arm en borst

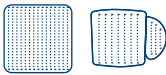Model	Toelichting
	Armbandageset universeel (V823) - Universele maatvoering incl. een handpad en elleboogpad. Zelf op de juiste lengte knippen. Met klittenband verstelbaar.
	Armbandageset confectie/naar maat (V822) - Verkrijgbaar in zes confectiematen of naar maat. Inclusief een handpad en elleboogpad.
	Elleboogpad (V842) - Universele maatvoering, per stuk, 10 x 13 cm, te gebruiken in de elleboogplooï / holte.
	Compsheet (V836) - Compsheet kunt u in elke gewenste vorm op maat knippen. Compressierol (V835) - VaroPad op rol om circulair een lichaamsdeel mee in te pakken.
	Borstpad (V837) - Voorgevormde borstpad in drie confectiematen. Borstbandage nacht (V838) - VaroPad in de vorm van een compressieBH. Verstelbaar met klittenband. In zes maten.
	Handpad (V844) - Verkrijgbaar in universele maatvoering (8,5 x 24 cm) of naar maat. De twee vingeropeningen zijn voor de middelvinger en de ringvinger. Te gebruiken om extra compressie te geven op de handrug.