

ReadyWrap®

Compressieverbanden met klittenbandsluiting.



Support for Life[✦]

ReadyWrap®, de flexibele compressieverbanden voor patiënten met veneuze en lymfeandoeningen aan armen en benen.

ReadyWrap® maakt het eenvoudig klinisch effectieve compressie te bereiken¹, en biedt de ondersteuning die patiënten nodig hebben om hun aandoening niet alleen vandaag, maar hun hele leven onder controle te houden.

Eenvoudig te gebruiken, aan te brengen en in te stellen^{3,4} – zelfs met artrotische handen³

Door het dunne ontwerp kan de patiënt normaal schoeisel dragen²

Maakt zelfzorg mogelijk¹¹

Ondersteun patiënten hun leven lang met
Ready Wrap®

Meer therapietrouw – wordt goed verdragen door de patiënt⁴

Zelfmanagement: kosten-effectief alternatief voor compressief zwachtelen¹¹

Bespaart tijd¹¹

Waarom kiest u voor ReadyWrap®

ReadyWrap® flexibele compressieverbanden zijn ontworpen als eenvoudig te gebruiken compressietherapie voor patiënten met veneuze en lymfeaandoeningen.

ReadyWrap® is beter voor patiënten

Eenvoudig te gebruiken³, met gekleurde VELCRO® klittenbandsluitingen

- korte sluitbanden aan de voorkant helpen de patiënt bij het aanbrengen en aanpassen^{3,4}
- overlappende banden minimaliseren gebruikersfouten bij het aanbrengen en kunnen onbedoeld compressieverlies voorkomen als de patiënt het product niet perfect aanbrengt¹
- door het ontwerp met een laag profiel kunnen de patiënten gewoon schoeisel blijven dragen²
- alle producten zijn verkrijgbaar in zwart of beige 



ReadyWrap® is klinisch effectief

Korterek-eigenschappen¹³ – therapeutische werking en een aangename lagere druk bij rust

- positieve resultaten bij beenulcera^{3,4,5} en patiënten met lymfoedeem⁴
- effectief bij het behandelen van herhaald optredende zwelling (oedeem) en zweervorming⁵
- uitstekende SSI tussen de 16 en 23, net zoals bij niet-elastische bandages¹³
- 50% overlappende banden zodat er geen gaten ontstaan (vensteroedeem), kunnen worden aangepast aan een veranderende omtrek van het been^{4,5}



ReadyWrap® is kosteneffectief

ReadyWrap® kan kostenbesparingen bieden doordat⁷⁻¹¹:

- het tijd bespaart omdat deze bandage in vergelijking met compressiebandages sneller en eenvoudiger kan worden aangebracht
- er minder bandagemateriaal wordt gebruikt – ReadyWrap kan worden gewassen en hergebruikt gedurende een periode van zes maanden
- het eenvoudig kan worden aangebracht door de patiënt zelf of een verzorger



ReadyWrap®

Helpt het leven van alledag eenvoudiger te maken.

ReadyWrap® heeft één doel – het verbeteren van de levenskwaliteit van uw patiënten. Wij richten ons op een combinatie van een geslaagde klinische behandeling en het verminderen van tijd en kosten.

Support for Life ✦



“ReadyWrap® is zo eenvoudig te gebruiken door patiënten, dat onze kliniek **het aantal behandel sessies heeft verminderd** van 3 naar 2 keer per week, en **de behandel tijden zijn gehalveerd** in vergelijking met zwachtelen. Mijn patiënten krijgen hun onafhankelijkheid weer terug en wij kunnen de kosten uitstekend onder controle houden.”

Ellen,
huid- en oedeemtherapeut

Om alle verhalen over ReadyWrap® te lezen, gaat u naar:
www.SupportforLife.com

“Ik moet voor compressietherapie soms wel een paar keer per week naar een patiënt toe. En dat is niet kosteneffectief. ReadyWrap® heeft ons geholpen **de verpleegtijd te verminderen** en ook **om de zwelling zodanig te laten afnemen**, dat mijn patiënt zijn schoenen weer aan kon en zelfs weer op de fiets kon stappen.”


Robert,
wijkverpleegkundige



1 voorgevormde gebogen banden passen zich aan het been aan voor comfort en ondersteuning

2 unieke brede versteviging op de kuit voor comfort⁴, vermindert rek en zorgt voor vormbehoud van de bandage


3 VELCRO® klittenbandsluitingen met kleurcode – maakt aanbrengen eenvoudig⁴

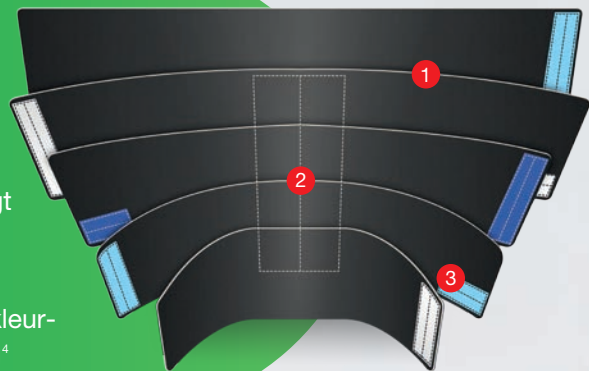

Let op: Elk ReadyWrap compressieverband voor het been wordt geleverd met een onderkous, met uitzondering van de ReadyWrap compressieverbanden voor de tenen. De onderkousen zijn ontworpen om gedragen te worden onder de ReadyWrap compressieverbanden.

ReadyWrap® Compressiesysteem voor het been.

Korte banden met kleurcode

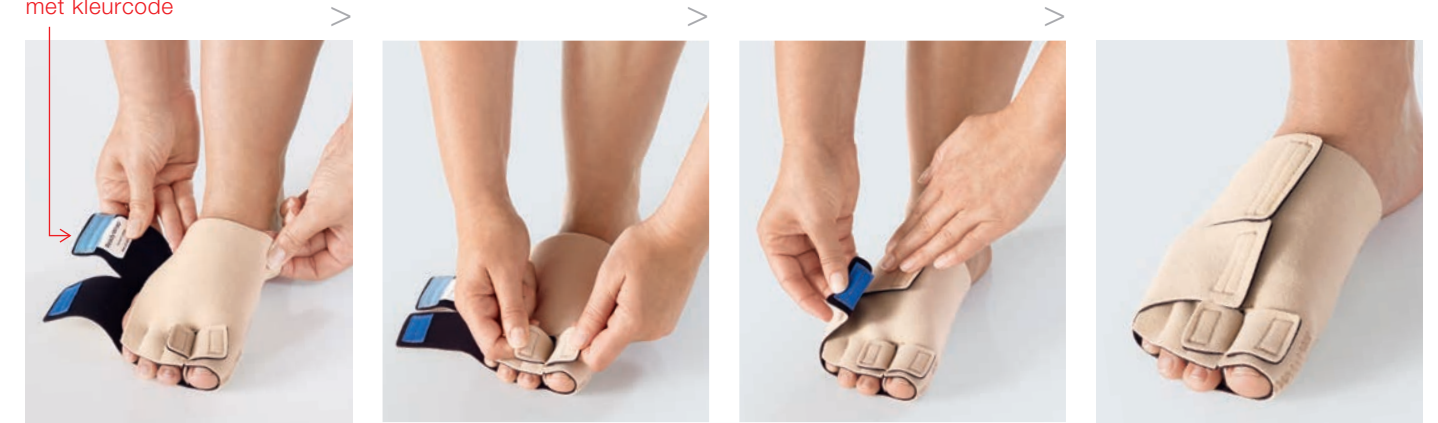

ReadyWrap® voor de tenen

- het unieke ontwerp kan aangepast worden aan verschillen in teenomvang
- geeft in combinatie met een ReadyWrap compressieverband voor de voet compressie over de gehele voet
- specifiek ontwerp voor links en rechts voor een betere pasvorm



ReadyWrap® voor de voet

- specifiek ontwerp voor de linker- of rechterschoen en inkeping voor betere pasvorm
- eenvoudig aan te trekken ontwerp met twee banden, past in de meeste schoenen
- overlapt de compressieverbanden voor onderbeen en tenen zodat tussenruimte wordt voorkomen

Instructie weergegeven zonder onderkous voor een betere visualisatie.

ReadyWrap®

Compressiesysteem voor het been.



ReadyWrap® voor het onderbeen

- kan worden gedragen met elastische kousen voor extra ondersteuning en bescherming
- verstevigde achterkant vermindert rek en versterkt de structurele ondersteuning
- overlapt de compressieverbanden voor voet en knie zodat tussenruimte wordt voorkomen



ReadyWrap® voor de knie

- eenvoudig ontwerp met drie banden biedt een comfortabele pasvorm, waarmee afknelling en drukpunten worden voorkomen
- overlapt de compressieverbanden voor onder- en bovenbeen zodat tussenruimte wordt voorkomen



ReadyWrap® voor het bovenbeen

- materiaal met korte rek biedt vanaf de bovenrand van de patella tot de lies lage druk in rust en hoge druk tijdens beweging
- proximale band voor een betere pasvorm bij rechte of taps toelopende bovenbenen
- overlapt het compressieverband voor de knie zodat tussenruimte wordt voorkomen

ReadyWrap® verlengband



- verlengt een ReadyWrap standaardband met 10 cm
- blijft goed zitten dankzij de vorm van een 'Y'-klem
- geschikt voor ReadyWrap compressieverbanden voor onderbeen, knie en bovenbeen

1 voorgevormde gebogen banden passen zich aan de arm aan voor comfort en ondersteuning

2 voering voor de arm voor een juiste pasvorm

3 VELCRO® klittenbandsluitingen met kleurcode maken aanbrengen eenvoudig



ReadyWrap® Compressiesysteem voor de arm.




ReadyWrap® voor de arm

- de dubbelgestikte voering maakt eenvoudig aan- en uittrekken met één hand mogelijk
- voorzien van een gepolsterd pols- en ellebooggedeelte om drukpunten te voorkomen en extra comfort te bieden
- tweezijdig ontwerp volgt de contouren van de linker- en de rechterarm

ReadyWrap® voor pols en hand

- bedekt de pols en de hand
- specifiek ontwerp voor links of rechts volgt de contouren van de hand op een natuurlijkere manier. Gepolsterd aan de kant van de handpalm en handrug om consistente compressie te bieden over benige uitsteeksels
- ontworpen met schuimpads voor extra ondersteuning
- het compressieverband voor pols en hand is ontworpen om het ReadyWrap compressieverband voor de arm te overlappen om tussenruimte te verminderen

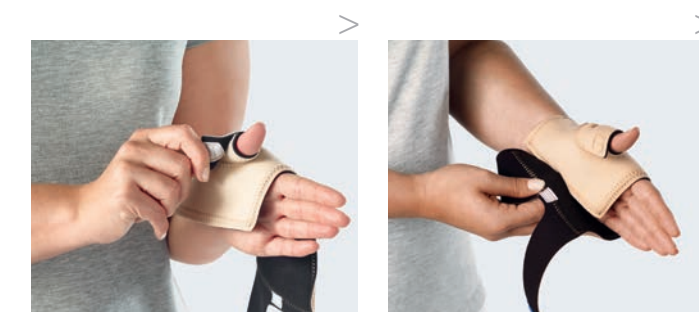

ReadyWrap®

Opmeten van het been.

De basis voor een geslaagde behandeling – kies de maat die het beste past.

Alleen een perfect passende ReadyWrap kan het best mogelijke therapeutische effect tot stand brengen. Om die reden is het van groot belang de juiste maat te bepalen voor uw been. Met behulp van onze maattabellen kunt u de juiste maat snel en eenvoudig bepalen. De maattabel vindt u op www.Lohmann-Rauscher.com

1 Markeer eerst de meetpunten en meet daarna de omvang van het been van boven naar beneden. Zodra de omvang voor het gewenste compressieverband is gemeten, gaat u verder met het opmeten van de afzonderlijke lengtes tussen de weergegeven meetpunten – IG-E', ID-B en IA-Y.



ReadyWrap® Been
Recept- en Bestelformulier verbandmiddelen.

1 Patiënt gegevens

Naam patiënt: _____ Handtekening + Naam arts/verpleegkundig specialist: _____

Geboortedatum: _____ Voorletters: _____ Naam: _____

Adres: _____ Adres, postcode, plaats en naam van vestiging: _____

Postcode / Woonplaats: _____

Verzekeraar: _____

Polisnummer: _____ Specialisme: _____ AGB Code: _____

Burger Service Nummer: _____ ☐ Eerste verstrekking ☐ Herhalingsverstrekking

2 Uw gegevens

Naam Praktijk / Instelling: _____ Naam Behandelaar: _____

Adres: _____

Postcode / Woonplaats: _____ Paraaf leverancier na levering: _____

3 Toepassingsgebied ☐ compressieve wondzorg ☐ compressietherapie

In geval van wond: 1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist? ☐ ja ☐ nee
2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of verpleegkundig specialist behandelaar blijft? ☐ ja ☐ nee
3 Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21 dagen? ☐ ja ☐ nee

Compressiehulpmiddel wordt ingezet voor onderste extremiteiten: ☐ Links ☐ Voet ☐ Bovenbeen ☐ Rechts ☐ Onderbeen

4 Medische indicatiestelling voor compressiehulpmiddel ten behoeve van oedeemreductie

☐ Lymfoedeem ☐ primair ☐ secundair ☐ Lipedeem lipo-hypertrofie ☐ Venus oedeem ☐ Posttrombotisch oedeem ☐ Posttraumatisch oedeem

☐ Anders _____

5 Duur van de behandeling in weken:

Behandeladvies: gebruik voor ☐ dag ☐ nacht ☐ gebruik op geleide van klachten

Let op! Bij elke bestelling is een handtekening van de arts of kopie van een verwijfsbrief nodig.

6 ReadyWrap®

	Lengte (cm)	Kleur	Maat	Artikelnr.	Z-indexnr.	Aantal
Bovenbeen	☐ 25 ☒ 30 ☐ 35	☐ Beige ☒ Zwart		104472		2
Knie				104460		2
Onderbeen	☐ 30 ☒ 35 ☐ 40	☐ Beige ☒ Zwart		104444		2
Voet rechts				104432		1
Voet links						
Tenen rechts				104412		1
Tenen links						
Verlengband				104740		1
ActiFast Buisverband	7,5 cm x 3 m	Blauw	88580	16635299		
ActiFast Buisverband	10,75 cm x 3 m	Geel	88584	16635302		
Gebruiksaanwijzing		One size	105489			1

7 Aflevering

☐ U wenst de verbandstoffen op de poli / in de praktijk te ontvangen.
☐ U wenst de verbandstoffen bij de patiënt thuis te ontvangen.

8 Bestelwijze

Fax dit formulier naar: 036 546 30 21 of Mail dit formulier naar: ReadyWrap@nl.LRmed.com

9 Meetpunten:

2 cm onder de bilploo
5 cm boven de knie
2 tot 3 cm onder de fossa poplitea
Grootste omvang van de kuit
2 cm boven de malleolus
Rondom de wreef en hiel met de voet in dorsaalflexie
Rondom de basis van de tenen

10 Lengtematen:

LG-EI De lengte tussen punt E1 (5 cm boven de knie) en punt G (2 cm onder de bilploo)
LD-B De lengte tussen punt B (2 cm boven de malleolus) en punt D (2 cm onder de fossa poplitea)
LA-Y Hiel tot de basis van de tenen

11 Informatie bij het aanmeten:

Meetpunten:

2 cm onder de bilploo
5 cm boven de knie
2 tot 3 cm onder de fossa poplitea
Grootste omvang van de kuit
2 cm boven de malleolus
Rondom de wreef en hiel met de voet in dorsaalflexie
Rondom de basis van de tenen

Lengtematen:

LG-EI De lengte tussen punt E1 (5 cm boven de knie) en punt G (2 cm onder de bilploo)
LD-B De lengte tussen punt B (2 cm boven de malleolus) en punt D (2 cm onder de fossa poplitea)
LA-Y Hiel tot de basis van de tenen

12 Let op: Indien u kiest voor ReadyWrap voor de tenen, is de standaard onderkous met gesloten tenen niet geschikt. In dat geval adviseren wij ActiFast® buisverband, Blauw of Geel.

13 Lohmann & Rauscher B.V. - Antennestraat 86 B - 1322 AS Almere
T 036 546 30 20 - F 036 546 30 21 - ReadyWrap@nl.LRmed.com

3 Neem deze informatie over om het bestelformulier verder in te vullen en controleer of alle gegevens juist zijn.

2 Kies de juiste maat aan de hand van de afmetingen op het bestelformulier en vink de artikelcode aan.

ReadyWrap® Voet en Been

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Bovenbeen (LG-E1)	cG 48 - 63 cE1 38 - 48	Z-index Nummer 58 - 73 45 - 58	Z-index Nummer 68 - 83 52 - 68	Z-index Nummer 78 - 93 59 - 78	Z-index Nummer 88 - 103 66 - 88
Beige 25	☐ 104478	☐ 15818659	☐ 104474	☐ 15818675	☐ 104470
Zwart 25	☐ 104479	☐ 15813991	☐ 104475	☐ 15814017	☐ 104471
Beige 30	☐ 104480	☐ 15818667	☐ 104476	☐ 15818683	☐ 104472
Zwart 30	☐ 104481	☐ 15814009	☐ 104477	☐ 15814025	☐ 104473

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Knie (1 lengte 20)	cE1 38 - 48 cD 28 - 38	Z-index Nummer 45 - 58 33 - 43	Z-index Nummer 52 - 68 38 - 48	Z-index Nummer 59 - 78 43 - 58	Z-index Nummer 66 - 88 53 - 68
Beige	☐ 104464	☐ 15818756	☐ 104462	☐ 15818764	☐ 104460
Zwart	☐ 104465	☐ 15818489	☐ 104463	☐ 15818497	☐ 104461

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Onderbeen (LD-B)	cC 28 - 38 cB 18 - 23	Z-index Nummer 33 - 43 20 - 28	Z-index Nummer 38 - 48 25 - 33	Z-index Nummer 43 - 58 30 - 38	Z-index Nummer 53 - 68 35 - 43
Beige 30	☐ 104450	☐ 15818802	☐ 104446	☐ 15818810	☐ 104442
Zwart 30	☐ 104451	☐ 15818381	☐ 104447	☐ 15818411	☐ 104443
Beige 35	☐ 104452	☐ 15818845	☐ 104448	☐ 15818853	☐ 104444
Zwart 35	☐ 104453	☐ 15818403	☐ 104449	☐ 15818438	☐ 104445

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Voet	LA-Y tot 21 cB 18 - 23 cY 28 - 33	Z-index Nummer 20 - 28 30 - 38	Z-index Nummer 25 - 33 35 - 43	Z-index Nummer 30 - 38 40 - 48	Z-index Nummer 35 - 43 40 - 48
R Beige	☐ 104436	☐ 15818934	☐ 104434	☐ 15818918	☐ 104432
R Zwart	☐ 104437	☐ 15818535	☐ 104435	☐ 15818551	☐ 104433
L Beige	☐ 104428	☐ 15818896	☐ 104426	☐ 15818926	☐ 104424
L Zwart	☐ 104429	☐ 15818527	☐ 104427	☐ 15818543	☐ 104425

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Tenen	cA 18,0 - 20,4	Z-index Nummer 20,5 - 23,5 30 - 38	Z-index Nummer 23,6 - 26 35 - 43	Z-index Nummer 26,1 - 28,5 40 - 48	Z-index Nummer 28,6 - 31 40 - 48
R Beige	☐ 104416	☐ 15985903	☐ 104414	☐ 15985881	☐ 104412
R Zwart	☐ 104417	☐ 15985962	☐ 104415	☐ 15985954	☐ 104413
L Beige	☐ 104406	☐ 15985792	☐ 104404	☐ 15985784	☐ 104402
L Zwart	☐ 104407	☐ 15985849	☐ 104405	☐ 15985830	☐ 104403

ReadyWrap®	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
Verlengband	cA 18,0 - 20,4	Z-index Nummer 20,5 - 23,5 30 - 38	Z-index Nummer 23,6 - 26 35 - 43	Z-index Nummer 26,1 - 28,5 40 - 48	Z-index Nummer 28,6 - 31 40 - 48
Beige	☐ 104740	☐ 16254473	☐ 104741	☐ 16254481	☐ 104742
Zwart	☐ 104741	☐ 16254481	☐ 104742	☐ 16254489	☐ 104743

ActiFast®	Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.
Buisverband	88582	7,5 cm x 10 m	Blauw	16613074
Buisverband	88586	10,75 cm x 10 m	Geel	16613090

14 Let op: Indien u kiest voor ReadyWrap voor de tenen, is de standaard onderkous met gesloten tenen niet geschikt. In dat geval adviseren wij ActiFast® buisverband, Blauw of Geel.

15 Lohmann & Rauscher B.V. - Antennestraat 86 B - 1322 AS Almere
T 036 546 30 20 - F 036 546 30 21 - ReadyWrap@nl.LRmed.com

Opmeten van de arm.

ReadyWrap® Arm

Recept- en Bestelformulier verbandmiddelen.

ReadyWrap® Armverband (I-C-G)	cG cE cC	Small 22 - 29 19 - 26 13,5 - 17	Z-index Nummer	Medium 25 - 36 24 - 33 15,5 - 20	Z-index Nummer	Large 31 - 43 29 - 40 17,5 - 23	Z-index Nummer	Extra Large 36 - 50 30 - 43 17,5 - 23	Z-index Nummer
■ Beige 43		□ 104514	15855988	□ 104508	15855961	□ 104502	15855953	□ 104520	15983781
■ Zwart 43		■ 104515	15856011	□ 104509	15856003	□ 104503	15855996	□ 104521	15983803
■ Beige 46		□ 104516	15856135	□ 104510	15856127	□ 104504	15856119	□ 104522	15983846
■ Zwart 46		□ 104517	15856178	□ 104511	15856151	□ 104505	15856143	□ 104523	15983854
■ Beige 49,5		□ 104518	15856070	□ 104512	15856052	□ 104506	15856054	□ 104524	15983811
■ Zwart 49,5		□ 104519	15856100	□ 104513	15856097	□ 104507	15856089	□ 104525	15983838

ReadyWrap® Handschoen (I-A-C)	I-A-C cC cA	Small tot 12,5 13,5 - 17 18 - 20	Z-index Nummer	Medium tot 13,5 15,5 - 20 20 - 22	Z-index Nummer	Large tot 14,5 17,5 - 23 22 - 24	Z-index Nummer	Extra Large tot 15,5 19,5 - 26 24 - 26	Z-index Nummer
■ R-Beige		□ 104498	15863573	□ 104496	15863565	□ 104494	15863557	□ 104500	15863581
■ R-Zwart		□ 104499	15863638	□ 104497	15863611	□ 104495	15863603	□ 104501	15863646
■ L-Beige		□ 104490	15863492	□ 104488	15863484	□ 104486	15863476	□ 104492	15863506
■ L-Zwart		■ 104491	15863530	□ 104489	15863522	□ 104487	15863514	□ 104493	15863549

Informatie bij het aanmeten:

Meetpunten:

cA Breedste punt van de handpalm, net onder de metacarpale falangeale gewrichten

cC Smalste punt van de pols

cE Rondom het ellebooggewricht en in de elleboogplooi

cG Bovenkant van de arm, net onder de okselplooi

Afstanden:

I-A-C De lengte tussen punt A (breedste punt van de handpalm, net onder de metacarpale falangeale gewrichten) en punt C (smalste punt van de pols)

I-C-G De lengte tussen punt C (smalste punt van de pols) en punt G (bovenkant van de arm, net onder de okselplooi)

nb c = omtrek en l = lengte

Lohmann & Rauscher B.V. · Antennestraat 86 B · 1322 AS Almere
T 036 546 30 20 · F 036 546 30 21 · ReadyWrap@nl.LRmed.com

2016-07-01

Alleen een perfect passende ReadyWrap kan het best mogelijke therapeutische effect tot stand brengen. Om die reden is het van groot belang de juiste maat te bepalen voor uw arm. Met behulp van onze maattabellen kunt u de juiste maat snel en eenvoudig bepalen. De maattabel vindt u op **www.Lohmann-Rauscher.com**

2 Kies de juiste maat aan de hand van de afmetingen op het bestelformulier en vink de artikelcode aan.

3 Neem deze informatie over om het bestelformulier verder in te vullen en controleer of alle gegevens juist zijn.

1 Markeer eerst de meetpunten en meet daarna de omvang van de arm. Zodra de omvang voor het gewenste compressieverband is gemeten, gaat u verder met het opmeten van de afzonderlijke lengtes tussen de weergegeven meetpunten – IC-G en/of IA-C.



ReadyWrap®

Informatie voor de gebruiker.

Voorafgaand aan de behandeling dient er een volledig holistische en vasculaire diagnose te worden uitgevoerd. Raadpleeg de plaatselijke en nationale richtlijnen.

Indicaties

Compressieverband voor flebologische en lymfologische indicaties, zoals veneuze aandoeningen, chronisch oedeem en lymfoedeem.

Voor het reguleren of verminderen van het oedeem en het aanpassen van de vorm van benen en armen.

Voorzorgsmaatregelen

EAI <0,8 – compressietherapie mag uitsluitend worden gebruikt onder supervisie van een medisch of vaatspecialist.

Niet geschikt voor een enkelomvang van minder dan 18 cm, tenzij polstering wordt toegepast om de enkelomvang te vergroten tot 18 cm of meer.

Dit systeem is mogelijk ongeschikt als er zwaar exsuderende en/of grote wonden aanwezig zijn.

Net als bij alle compressiesystemen is voorzichtigheid geboden als:

- cardiale overbelasting vermoed wordt
- de patiënt diabetes heeft
- de patiënt een gevorderde aandoening van de kleine bloedvaten heeft
- er sprake is van een arteriële aandoening
- er sprake is van nierfalen
- er sprake is van reumatoïde artritis

Na het aanbrengen moet het compressieverband onmiddellijk worden verwijderd als de patiënt tekenen van pijn, verminderde kleur of een doof gevoel ervaart in de extremiteiten.

Contra-indicaties

- arteriële insufficiëntie of een EAI <0,8
- acute DVT (diepveneuze trombose)
- onbehandeld congestief hartfalen
- onbehandelde kanker
- onbehandelde infectie, zoals cellulitis
- allergie voor het materiaal
- matig tot ernstig perifeer vaatlijden

Verzorgingsinstructies voor ReadyWrap compressieverbanden voor onderbeen, knie en bovenbeen

Algemeen

- wees voorzichtig en forceer niets, om draadbreek te voorkomen
- staak het gebruik als er huiduitslag, een doof gevoel of veranderingen van de huidskleur optreden

Wassen

- was met de hand in warm water met een klein beetje mild wasmiddel
- spoel goed uit in warm water
- gebruik GEEN bleekmiddelen of wasverzachter

Drogen

- plat liggend laten drogen
- niet drogen in de wasdroger en niet strijken
- de droogtijd kan worden verkort door het compressieverband op een handdoek te leggen en op te rollen in de handdoek om overtollig water op te vangen
- zorg ervoor dat de VELCRO® klittenbandsluitingen geen contact maken met uw handdoek

Materiaal

- ReadyWrap maakt gebruik van VELCRO® klittenbandsluitingen. Bevat klittenbandsluitingen van het merk "VELCRO®"
- bevat geen natuurlijk rubber (latex)
- de materiaalsamenstelling van ReadyWrap is:
 - ◆ 61% nylon
 - ◆ 33% polyurethaan
 - ◆ 6% elastaan (Spandex)

Voor meer informatie over ReadyWrap® gaat u naar:
www.SupportforLife.com



Klantenservice

Lohmann & Rauscher biedt u een eenvoudige oplossing voor compressie bij het zelfmanagement/ met de compressieverbanden met klittenbandsluiting. Indien u vragen hebt, meer informatie wilt hebben of als u wilt bestellen, neemt u dan contact op met ons team van de Klantenservice, van maandag tot en met vrijdag:

Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86b · 1322 AS Almere
info@nl.lrmed.com · +31(0) 36 5463020

Ga voor meer informatie naar
www.Lohmann-Rauscher.com

Referenties:

- 1) Ehmann, S.; Bock, K. (2017). Critical evaluation of bandage alternative characteristics: a case series. EWMA Conference, Amsterdam, Netherlands.
- 2) Robert de Klerk, District Nurse, Buurtzorg Zeeburg, Amsterdam NL; Jeanette Muldoon, Activa Healthcare Ltd., L&R UK. How can VELCRO Compression Systems contribute in Wound Management. Annual Meeting of the European Wound Management Association (EWMA), Amsterdam 3–5 May 2017.
- 3) Hampton, S. (2016). The difficulty and the solution of compression therapy in a healed venous leg ulcer. Br J Community Nursing, 21(9), p34–p38.
- 4) Ehmann, S. (2016). Multinational, pilot audit of a VELCRO adjustable compression wrap system for venous and lymphatic conditions. JWC, 25(9), p513–p520.
- 5) Bock, K.J. (2016). Adjustable compression wraps can prevent ulcer re-occurrence in phlebo-lymphedema; a case series. Poster presentation, SAWC, Austin 2016.
- 6) Guest, J.F.; Ayoub, N.; McIlwraith, T. et al. (2015). Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK. BMJ, Open 5: e00w9283. doi:10.1136/bmjopen-2015-009283.
- 7) Elvin, S. Cost efficacy of using Juxta CURES™ and UCS™ debridement cloths. Journal of Community Nursing, 2015; 29(2), p25–p28.
- 8) Wigg, J.; Lee, N. Redefining essential care in lymphoedema. Br J Community Nursing, 2014; 19: Chronic Supple, p24–p29.
- 9) Bianchi, J.; Mahoney, K.; Nugent, L.; Kenn, D. A fresh way to treat venous leg ulcers with measured compression. Br J Community Nursing 2013; 18(4), Suppl, p34–p40.
- 10) Nugent, L. Juxta CURES™: compression for healing venous ulcers. Br J Community Nursing, 2013; 18(5), p40–p45.
- 11) Ellen Kuijper-Kuip, Skin and edematherapist – MediSkin – Total Skin Care; Jeanette Muldoon, Activa Healthcare Ltd., L&R UK. Meeting the practical and economic challenges of managing skin and wounds using self-care as an option for patients with lymphedema. Annual Meeting of the European Wound Management Association (EWMA), Amsterdam, 3–5 May 2017.
- 12) Rabe, E.; Pannier-Fischer, F.; Bromen, K.; Schuldt, K.; Stang, A.; Poncar, Ch.; Wittenhorst, M.; Bock, E.; Weber, S.; Jöckel, K.H. (2003). Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie, 32(1), p1–p14.
- 13) Muldoon, J.; Hampton, S. (2017). Validity, Inter-rater and Intra-rater reliability of an Adjustable Compression Device Application, SAWC, San Diego 2017.