



Bratelle

JE MERKT DAT HET WERKT!



Bratelle Compressie Massage BH (Point Pressure device) voor vrouwen en mannen met lymfoedeemklachten in het borstgebied

Door de Bratelle dagelijks te dragen nemen lymfoedeemklachten af en ervaart u minder pijn, een minder zwaar gevoel en minder zwelling. Ook voelen littekens en harde plekken in de borst(en) zachter. De Bratelle heeft geen beugels en naden en is ontlastend voor de lymfevaten door de combinatie van massage en compressie. Bij intensief gebruik en zorgvuldig wassen gaat de Bratelle 6-9 maanden mee.

Voorschriften en adviezen

Om de therapeutische werking en de levensduur van de Bratelle te garanderen dient de Bratelle speciaal behandeld te worden.

Hieronder worden de voorschriften en adviezen beschreven met betrekking tot de behandeling van de Bratelle.

- De Bratelle dient om de 4 à 5 dagen gewassen te worden om de werking optimaal te houden. Het elastaan in de Bratelle rekt uit bij het dragen, maar na het wassen komt de Bratelle weer terug op spanning/in de eerdere vorm/maat. Ook zorgt wassen van de Bratelle ervoor dat transpiratievocht en huidschilfers worden verwijderd waardoor de elasticiteit behouden blijft.
- De Bratelle dient gewassen te worden met een vloeibaar wasmiddel. Er mag geen wasverzachter, bleekmiddel of inweekmiddel gebruikt worden.
- De Bratelle mag niet in de droger.
- De Bratelle mag in de wasmachine op 30 graden gewassen worden.
- We adviseren de Bratelle liggend te drogen. Droog de Bratelle niet in de zon of op de verwarming. Daarnaast mag je de Bratelle niet uitwringen.
- Wissel de Bratelle's regelmatig. Hierdoor neemt de druk van beide Bratelle's tegelijkertijd af.
- De Bratelle moet regelmatig worden vernieuwd.
- Sieraden aan de armen kunnen de Bratelle beschadigen. Let bij het aan- en uittrekken van de Bratelle op dat u niet blijft haken met uw sieraden.
- Trek de Bratelle 's ochtends bij het opstaan aan. Zorg ervoor dat de huid goed droog is.
- De Bratelle moet 's avonds weer uit (bij voorkeur op het moment voor het slapen gaan). Er mag eventueel met de Bratelle geslapen worden in overleg met uw therapeut.
- Vermijd contact tussen de Bratelle en vette crèmes.
- Niet zwemmen of douchen met de Bratelle aan.



HHC TEK B.V.
Noordeinde 178 | 3341 LW | Hendrik-Ido-Ambacht
T.: 078-684 97 89 | F.: 078-684 96 30
E.: info@human-healthcare.nl
www.human-healthcare.nl
IBAN NL73ABNA0536097100

Ons kantoor is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur

**Bratelle Compressie Massage BH
Champagne**

75A



CE

60% Viscose

25% Polyester

15% Lycra

03-2024

Art.nr. BRAMC75ACH

www.human-healthcare.nl

**Bratelle Compressie Massage BH
Herfst**

75A



CE

60% Viscose

25% Polyester

15% Lycra


03-2024

Art.nr. BRAMC75AHE

www.human-healthcare.nl

**Bratelle Compressie Massage BH
Zwart**

75A

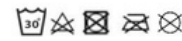

CE

60% Viscose

25% Polyester

15% Lycra

03-2024

Art.nr. BRAMC75AZW

www.human-healthcare.nl

**Bratelle Compressie Massage BH
Lila**

75A



CE

60% Viscose

25% Polyester

15% Lycra

03-2024

Art.nr. BRAMC75ALI

www.human-healthcare.nl

**Bratelle Compressie Massage BH
Navy**

75A



CE

60% Viscose

25% Polyester

15% Lycra

03-2024

Art.nr. BRAMC75ANA

www.human-healthcare.nl

Etiket per maat per kleur met artikelnummer aanduiding

Duurzaam product en duurzame verpakking

Duurzaamheid is belangrijk voor ons, we willen het milieu zo min mogelijk belasten.

De Bratelle wordt 3D-gebreid: ze worden met innovatieve breimachines gemaakt en bestaan uit twee stukken. De Bratelle is vrij van beugels, naden en stiksels en bij de productie ontstaat eigenlijk helemaal geen restmateriaal. Traditionele beha's bestaan uit zo'n 40 onderdelen, die vanuit de hele wereld vervoerd en geassembleerd worden.

De Bratelle bestaat uit 8 onderdelen, wordt in de Benelux gebreid en in elkaar gezet, met minder afval en een minimale CO2-uitstoot tot gevolg.

De Bratelle wordt op 30 graden gewassen, wat veel milieuvriendelijker is dan wassen op 40 of 60 graden.

De Bratelle is een prachtig en goedwerkend hulpmiddel voor iedereen met lymfoedeemklachten in het borstgebied.

De Bratelle wordt zo duurzaam mogelijk verpakt en verzonden. Zowel de verzend zak als de verpakkingszak zijn van gerecycled materiaal gemaakt.

In een magazijn wordt voorraad gehouden. De orders worden dagelijks gepickt en verzonden. In de verpakking wordt een gebruiksaanwijzing en wasvoorschrift bijgesloten, voorzien van de contactgegevens.

Wij beperken gewicht en volume van ons pakket tot het minimum. En hebben voor een verpakking gekozen die past bij ons product. Hiermee verminderen zowel de hoeveelheid lege ruimte die we anders zouden verzenden, als ook de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal.

Plastic verzendzak

Gerecyclede plastic kledingzak, waarmee ons product veilig en onbeschadigd afgeleverd wordt

Wit, zwart binnenzijde

Zelfklevende sluiting

Afmeting: Plastic Verzendzakken 33x40cm

Verpakking

Gerecyclede plastic gripzak (1 bratelle per verpakking)

PE90

Afmeting: 220x310

(herbruikbaar)

Opening: korte zijde

Wasvoorschriften en gebruiksaanwijzing & contactgegevens

A5

Full colour 4/4

Gerecycled papier



GERECYCLED PLASTIC
RECYCLED PLASTIC
RECYCELTES PLASTIK
PLASTIQUE RECYCLÉ

VZQ046

