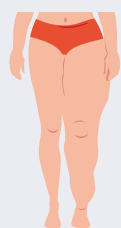


ADVIESWIJZER

JOBST VLAKBREI-ASSORTIMENT

voor de behandeling van lymfoedeem*

Bij het kiezen van het meest geschikte vlakbreimateriaal kan de ISL-classificatie* helpen. Dit geldt ook voor chronisch oedeem bij veneuze aandoeningen.

ISL-CLASSIFICATIE UITING OEDEEM		ARMKOUS	HANDSCHOEN		BEENKOUS	TEENKAP
ISL 1 De aandoening uit zich in het begin door oedeem dat weer verdwijnt als de arm of het been hoog gelegd wordt. Het oedeem kan in dit stadium pitting zijn.		ELVAREX SOFT	ELVAREX SOFT SEAMLESS		ELVAREX SOFT	
ISL 2A Het oedeem gaat nauwelijks weg door de arm of het been hoog te leggen en pitting is goed zichtbaar.		ELVAREX SOFT CONFIDENCE	ELVAREX SOFT SEAMLESS		ELVAREX SOFT CONFIDENCE	ELVAREX SOFT SEAMLESS
ISL 2B In dit stadium verschuift het karakter naar non-pitting en kan fibrose ontstaan.		CONFIDENCE ELVAREX	ELVAREX PLUS		CONFIDENCE ELVAREX	ELVAREX SOFT SEAMLESS ELVAREX PLUS
ISL 3 Het weefsel voelt hard aan (fibrose). Er ontstaan veranderingen in de huid, zoals verdikkingen, hyperpigmentatie, diepe en harde huidplooien, vervetting en wratjes.		ELVAREX	ELVAREX PLUS		ELVAREX	ELVAREX PLUS

* Aangepast op grond van: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

JOBST® Elvarex Soft

- Meer draagcomfort door het unieke zachte materiaal
- Meer aantrekgemak
- Luchtdoorlatend voor een aangenaam gevoel
- Beenkous in CCL 1, 2 en 3
- Armkous in CCL 1 en 2



JOBST® Elvarex Soft Seamless

- Gemaakt van het unieke zachte Elvarex Soft materiaal
- Naadloos voor meer comfort en therapietrouw
- Perfecte anatomische vormgeving
- In CCL 1 en 2



JOBST® Elvarex

- Sterk en slijtvast materiaal
- Zeer breed assortiment in maatwerk
- Luchtdoorlatend voor meer comfort
- Beenkous in CCL 1, 2, 3, 3 forte, 4 en 4 super
- Armkous in CCL 1, 2 en 2 forte



JOBST® Elvarex Plus

- Perfecte pasvorm door 3D-breitechniek
- Maximale bewegingsvrijheid door naadloze afwerking
- Sterk en slijtvast voor effectief oedeemmanagement
- In CCL 1 en 2



JOBST® Confidence

- Sluit zeer goed aan op de lichaamscontouren dankzij de unieke Contour Fit
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook stevige ondersteuning biedt
- Beenkous in CCL 1, 2 en 3
- Armkous in CCL 1 en 2




Tip: nieuwe opties, o.a. een comfort tailleband (gebreid en verstelbaar) en gekleurde naden


JOBST® Confidence biedt draagcomfort en bewegingsvrijheid als nooit tevoren



Contour Fit technology

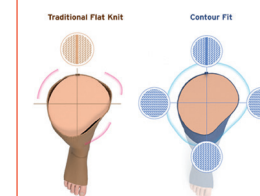

Advanced moisture management

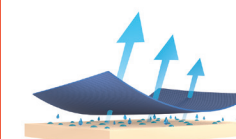

Uniek Panty design

Geen naden in het heupgebied



JOBST®,
an Essity brand

08/2025

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl

