



PRODUCTCATALOGUS

LYMFOLOGIE

2026

BAUERFEIND. DOOR MENSEN VOOR MENSEN. VOOR MEER LEVENSKWALITEIT.

Bauerfeind AG is een van de wereldwijd leidende fabrikanten van medische hulpmiddelen. Met onze producten brengen we mensen in beweging. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het behoud en het herstel van de gezondheid.

MEDISCHE KENNIS EN PROFESSIONELE COMPETENTIE

Al tientallen jaren ontwikkelen we compressieproducten voor flebologische en lymfologische ziektebeelden. We combineren dit met ongebreidelde inzet op het gebied van productie en service, en met een schat aan ideeën wat betreft ontwikkeling.

EFFECTIEVE VERScheidenheid

Met de op maat gemaakte vlakbreiproducten **VenoTrain curaflow** kunnen we onze patiënten met lymf- en lipoedemen helemaal individueel behandelen, dankzij 13 kleurvarianten en meer dan 1000 combinatiemogelijkheden voor producten en opties. De therapeutische voordelen zijn het hoge microvezelpercentage in het breiwerk, de vlakke naden voor gevoelige huid en speciale functionele zones, zoals de extra zachte knieholte.

De vlakgebreide compressiekous **VenoTrain curaflow strong** ondersteunt de behandeling van lymfoedemen of lipoedemen, bij zowel zeer zacht als verhard bindweefsel. Dankzij haar stevigheid blijft de kous aangenaam glad en ligt ze niet in huidplooien. De voelbare compressie met hoge werkdruk gaat samen met een aangenaam draaggevoel.

De vlakgebreide compressiekous **VenoTrain delight** biedt snelle ontlasting bij ernstige veneuze aandoeningen, lymfoedemen en lipoedemen. De confectiematen zijn perfect voor de basisbehandeling en acute behandelingen.

Onze rondgebreide compressiekous **VenoTrain impuls** combineert vele voordelen: dankzij het ademende microvezel en het krachtige compressiegaren is de kous uitermate comfortabel en toch erg doeltreffend. Een beetje beweging is al voldoende om de therapeutisch noodzakelijke druk te veroorzaken.

De rondgebreide armkous **VenoTrain soft** wordt gebruikt bij milde lymfoedemen aan de arm en als preventieve maatregel bij het risico op armlymfoedemen, na het verwijderen van lymfeklieren in de oksel of na bestralingen.*

COMPROMISLOZE KWALITEIT

Bauerfeind-producten voldoen niet gewoonweg aan de standaarden – ze vervullen de hoogste eisen aan kwaliteit, effectiviteit en draagcomfort. Dit wordt bevestigd door regelmatige controles. Als onze producten de tests met succes hebben doorlopen, worden ze voorzien van het desbetreffende keurmerk.

Alle medische VenoTrain-compressiekousen hebben een CE-label en voldoen dus aan de huidige wettelijke voorschriften. Daarnaast beschikken ze over het RAL-keurmerk en het OEKO-TEX STANDARD 100-kwaliteitslabel.

Onze medische compressiekousen worden van garen tot afgewerkt product ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland.

* De volledige lijst met indicaties vindt u in de VenoTrain-gebruiksaanwijzing, die bij het product wordt geleverd.

● MADE
● IN
● GERMANY



BAUERFEINDS BEKWAAMHEID IN COMPRESSIE: VIER DIMENSIES VAN UITMUNTENDHEID

Dankzij Bauerfeinds grote bekwaamheid in compressie genieten patiënten wereldwijd van betere gezondheid en mobiliteit, geheel volgens het motto:

**Door mensen voor mensen.
Voor meer levenskwaliteit.**



POWER OF COMPRESSION

Bauerfeind gebruikt zijn uitgebreide medische expertise om effectieve compressieoplossingen te ontwikkelen voor therapeutische doeleinden.

ENGINEERED COMPRESSION

Bauerfeind gaat erg precies te werk bij het maken van zijn breiwerk, voor innovatieve compressieproducten die voldoen aan de hoogste technische verwachtingen.

INNOVATION FOR COMPRESSION

Als toonaangevende innovator stelt Bauerfeind normen op het gebied van compressietechnologie om patiënten geavanceerde oplossingen te bieden.

BAUERFEIND-INNOVATIECENTRUM

Strenge tests en kwaliteitscontroles in het ontwikkelingscentrum van Bauerfeind garanderen de betrouwbaarheid en effectiviteit van elke productgeneratie.



ONZE SERVICE VOOR U BESTEL NU VIA DE BAUERFEIND-ONLINESHOP

Via de onlineshop van Bauerfeind kunt u offertes aanvragen en bestellingen plaatsen voor de arm- en beenkousen VenoTrain curaflow en voor de beenkousen VenoTrain curaflow strong.

KLANTENSERVICE LYMFOLOGIE

T +49 (0)800 0 01 05 60
F +49 (0)800 001 05 65
E info@bauerfeind.com



Bestel nu online:
experts.bauerfeind.com

SERVICEGARANTIES VOOR SPECIAALZAKEN IN DUITSLAND



GRATIS TELEFOON- EN FAX-HOTLINE

We zijn er voor u!



ALTIJD BEREIKBAAR*

Onze deskundige contactpersonen staan graag voor u klaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Via fax, e-mail en elektronische bestelsystemen kunt u ons 24 uur per dag bereiken. We zijn er voor u!

* Uitgezonderd in geval van systeemstoringen en onderhoudswerkzaamheden.



ELEKTRONISCHE BESTELSYSTEMEN

Bestel eenvoudig, snel en met verlaagde verzendkosten: via een elektronische interface of onze onlineshop met tal van functies, zoals kostenramingen en gegevensbladen.



SNELLE LEVERING

Besteld vóór 15.00 uur: wij verzenden magazijnartikelen nog dezelfde dag (uitgezonderd grote bestellingen). Expresswensen bespreken we graag met u. Bij uw bestelling geven we de exacte levertermijn aan.



EXPRESSPRODUCTIE VOOR EEN SNELLE VERZORGING OP MAAT

Spoedopdrachten voor maatwerk van VenoTrain impuls (caramel) die u voor 10.00 uur aanvraagt, maken en versturen we nog op dezelfde werkdag.



GEEN VERZENDKOSTEN

Bij een bestelling ter waarde van minimaal € 200,00 en bij maatwerk zijn de verzendkosten voor onze rekening. U kunt alle artikelen uit het gehele assortiment in één order bestellen.



GRATIS OPHALEN VAN ARTIKELEN

U faxt ons het ingevulde retourformulier of registreert uw retourzendingen in de onlineshop en wij regelen dat de artikelen worden opgehaald – op onze kosten.



ARTIKELEN RETOURNEREN BINNEN 365 DAGEN

Magazijnartikelen in onberispelijke staat kunt u binnen 365 dagen na levering aan ons retourneren volgens onze algemene voorwaarden.

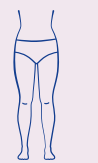
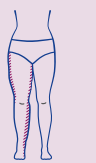
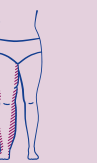
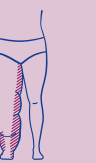
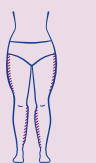



RETOURENBEHANDELING BINNEN VIJF DAGEN

Wij nemen uw retouren binnen vijf werkdagen na ontvangst in behandeling.

Lees hier meer over onze dienstverlening: experts.bauerfeind.com/b2b/service

PRODUCTOVERZICHT

LYMFOEDEEM		stadia	STADIUM 0 LATENT STADIUM	STADIUM 1 SPONTAAN OMKEERBAAR	STADIUM 2 NIET SPONTAAN OMKEERBAAR	STADIUM 3 NIET SPONTAAN OMKEERBAAR
	been					
	arm					
LIPOEDEEM		morfologie*		MORFOLOGISCHE INDELING 1	MORFOLOGISCHE INDELING 2	MORFOLOGISCHE INDELING 3
	been					
	arm					
PRODUCTAANBEVELING						
VenoTrain® soft (arm) rondgebreid						
VenoTrain® impuls rondgebreid						
VenoTrain® delight vlakgebreid						
VenoTrain® curaflow vlakgebreid						
VenoTrain® curaflow strong vlakgebreid						

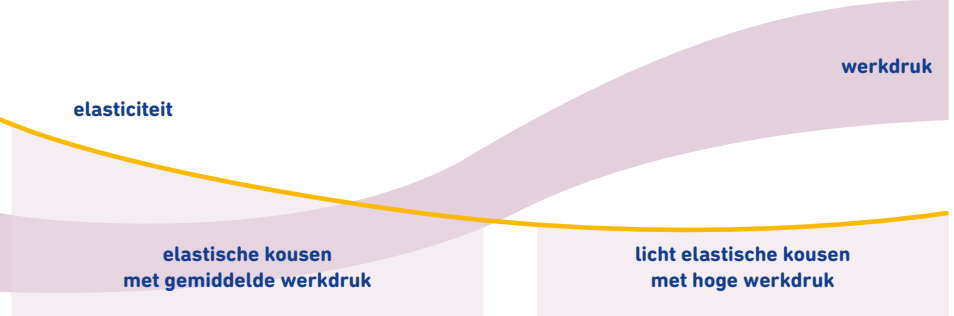

elasticiteit

werkdruk

elastische kousen met gemiddelde werkdruk

licht elastische kousen met hoge werkdruk

*Geen indeling in stadia op basis van de nieuwe richtlijn over lipoedeem. (Bron: richtlijn op basis van formele consensus over lipoedeem: AWMF [Duitse koepelorganisatie voor medische verenigingen]-registernummer 037-012, versie van 2024)

CONTENTS

BAUERFEIND ACADEMY
COMPETENT. DOELGERICHT.
SUCCESVOL.
Pagina 8

DE CURAFLOW-APP
HANDIGE TOOL VOOR UW
KLANTEN
Pagina 9

**KLEURENOVERZICHT
LYMFOLOGIE**
DE PASSENDE KOUS VOOR
ELKE SMAAK
Pagina 10

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
GEMAAKT VOOR DAGELIJKS
GEBRUIK
Pagina 10

**BOORDEN EN
SILICONENBOORDEN**
PERFECTE GRIP EN VEEL
COMFORT
Pagina 11

BEEN EN VOET



- 13 Behandelingssystematiek**
- 14 VenoTrain® impuls**
confectie- en maatproduct
- 16 VenoTrain® delight**
confectie- en maatproduct
+ opties
- 20 VenoTrain® curaflow**
product op maat
- 24 VenoTrain® curaflow strong**
product op maat
+ opties voor beenkousen
VenoTrain curaflow en
VenoTrain curaflow strong
- 31 Soorten kruisinzetten**

ARM EN HAND



- 33 Behandelingssystematiek**
- 34 VenoTrain® soft**
confectieproduct
- 36 VenoTrain® curaflow**
product op maat
+ opties voor armkousen

ACCESSOIRES

- 41 VenoTrain®-huidverzorging**
- 42 Accessoires**
- 43 VenoTrain® glider**

VOORSCHRIFT EN BESTELLING

- 44** Wijzigingen | Reparaties
- 46** Bestelbloccnotes
- 46** Overig assortiment van Bauerfeind

De informatie in deze catalogus kan per markt verschillen. Niet alle specificaties en details zijn van toepassing op de Benelux-markt. Raadpleeg uw accountmanager of de klantenservice voor de geldende specificaties.

BAUERFEIND ACADEMY

COMPETENT. DOELGERICHT. SUCCESVOL.

Wilt u dat klanten altijd voor uw speciaalzaak kiezen en de knowhow van uw team waarderen?

Daar helpen we u graag bij door middel van individuele, praktijkgerichte trainingen!

Onze aanbevelingen voor een geslaagde training:

- basistraining lymfologie
- opfristraining lymfologie
- training voor experts lymfologie
- orthopedie meets lymfologie

Neem contact op met uw verantwoordelijke Bauerfeind-medewerker.

NIEUW

Vind de juiste training in slechts enkele minuten met onze opleidingszoeker

bauerfeind.de/schulungsfinder



DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

+ ZEER PRAKTIJKGERICHTE TRAININGEN

De trainingen van onze academie bevatten ook altijd een medische component voor meer begrip en deskundigheid. Specifiek opgeleide, gediplomeerde trainers die vertrouwd zijn met de praktijk, zoals orthopedische technici, fysiotherapeuten en lymfetherapeuten, bespreken met u op een professionele manier de verschillende thema's afgestemd op de doelgroep.

+ IN-HOUSEDTRAININGEN OP MAAT

Wenst u een individuele training die helemaal is afgestemd op uw behoeften? Bij ons kunt u een volledig op maat gemaakte training boeken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld het onderwerp, de plaats en het tijdstip zelf kiezen. Neem contact op met ons.

+ ONLINETRAININGEN

Wilt u tijd- en kostenbesparend leren? Kies uit het brede aanbod van ons onlineprogramma de opleidingen die geschikt zijn voor u. Als het onderwerp dat u interesseert er toch nog niet tussen staat, ontwikkelen we graag een onlinetraining op maat voor u en stellen we een individueel aanbod samen.

+ ONLINECURSUSSEN

Voortaan stelt de Bauerfeind Academy onlinecursussen ter beschikking, zodat u overal en in uw eigen tempo kunt bijleren.

Neem contact op met uw verantwoordelijke Bauerfeind-medewerker of schrijf u hier in: experts.bauerfeind.com/b2b/online_training

Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij uw verantwoordelijke medewerker van de buitendienst of via de Bauerfeind Academy:

T +49 (0) 800 001 05 01
F +49 (0) 800 001 05 02
E akademie@bauerfeind.com



DE CURAFLOW-APP

HANDIGE TOOL VOOR UW KLANTEN* MET LYMFOEDEEM EN LIPOEDEEM



WELKE FUNCTIES HEEFT DE APP?

Tips van experts

over complexe fysische ontstuwings therapie (CFO), bijvoorbeeld over huidverzorging en manuele lymfedrainage en over Bauerfeind-compressieproducten

Motivatie

individueel en gevarieerd oefenprogramma dat klanten stimuleert om meer te bewegen in het dagelijks leven

Ondersteuning voor succesvol zelfmanagement

persoonlijk dagboek, meting van de omtrek en kalenderfunctie

Functie die meldt wanneer het tijd is voor nieuwe compressieproducten

Behandel met de VenoTrain curaflow en raad de curaflow-app aan.

Uw patiënten zullen u dankbaar zijn!

MEDISCH
HULPMIDDEL



* volgens doktersvoorschrift

Downloaden en meer informatie:

bauerfeind.de/curaflow-app



ONDERSTEUN
UW PATIËNTEN
MET ESSENTIËLE
INFORMATIE

Patiëntenbrochure
lymfologie

(art.-nr. 271 2010 2000 006)

online verkrijgbaar via:
bauerfeind.de/downloadbereich

KLEURENOVERZICHT LYMFOLOGIE VOOR ELKE SMAAK HET GESCHIKTE PRODUCT

	STANDAARDKLEUREN				SPECIALE KLEUREN			KLEUR-EFFECTEN		TRENDY KLEUREN			
	Caramel	Marine	Antraciet	Zwart	Crème	Espresso	Royal	Black Water	Black Fire	Irish Green	French Lavender	Toscana Red	Wild Berry
VenoTrain®													
impuls	•	•	•	•						•	•		
delight	•			•									
curaflow	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
curaflow strong	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
soft arm	•			•									

PRODUCTEIGENSCHAPPEN GEMAAKT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

VenoTrain curaflow VenoTrain curaflow strong

- soepel breiwerk voor gemak bij het aantrekken en een aangenaam draaggevoel
- extra zachte knieholte en binnenkant van de elleboog om zorgeloos te kunnen bewegen
- constante druk en optimaal drukverloop met voelbare werking tijdens het dragen, aangenaam zacht, fijnmazig breiwerk met rek in de dwars- en lengterichting
- perfecte pasvorm geschikt voor alle lichaamsvormen door anatomisch op maat gevormd weefsel

VenoTrain curaflow AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN

- ademend en vochtregulerend breiwerk met microvezel voor een aangenaam draagcomfort
- intelligente structuur in de lengterichting voor optimaal lymfetransport



BOORDEN EN SILICONENBOORDEN PERFECTE GRIP EN VEEL COMFORT

BOORDEN



COMPRESSIEBOORD

Boord met compressiebreiwerk zonder silicone of extra naden.

verkrijgbaar bij VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong



GAT-DOORTREKE-LASTIEK

Een boord die enkel voor panty's wordt gebruikt en als de norm geldt.

verkrijgbaar bij VenoTrain curaflow en VenoTrain impuls (maatwerk)



TAILLEBAND

Vlakke boord met elastische band zonder siliconencoating die veel draagcomfort biedt.

verkrijgbaar bij VenoTrain curaflow en VenoTrain impuls (AT bij confectiematen)



POREUZE BOORD

Minder druk aan het begin en/of uiteinde van de compressiekous; vloeiende overgang wanneer compressiekousen uit meerdere delen elkaar overlappen.

verkrijgbaar bij VenoTrain delight, VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong

SILICONENBOORDEN



MICRONOPPEN

De zeer elastische siliconenboord met kleine, vlakke noppen valt zelfs onder nauwsluitende kleding niet op. Het huidvriendelijke materiaal met een zacht oppervlak past zich uitstekend aan de vorm van uw been aan.

verkrijgbaar bij VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong



NOPPENSILICONENBAND

Onze klassieke siliconenboord biedt patiënten veel grip en is huidvriendelijk.

verkrijgbaar bij VenoTrain impuls, VenoTrain delight, VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong



STROKEN SILICONENBAND

Deze siliconenboord is gecoat met drie dunne strepen en biedt extra grip bij verhard weefsel en grote omvang.

verkrijgbaar bij VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong



BEHANDELINGSSYSTEMATIEK* BEEN EN VOET

Met behulp van de Bauerfeind-behandelingssystematiek vindt u de passende VenoTrain-compressiekous voor uw klanten. Bij de selectie van de compressiekous en de compressieklasse moet altijd rekening worden gehouden met de individuele situatie en behoeften van de patiënt in kwestie. Neem bij twijfel meteen contact met ons op.

LYMFOEDEEM

stadia

toestand

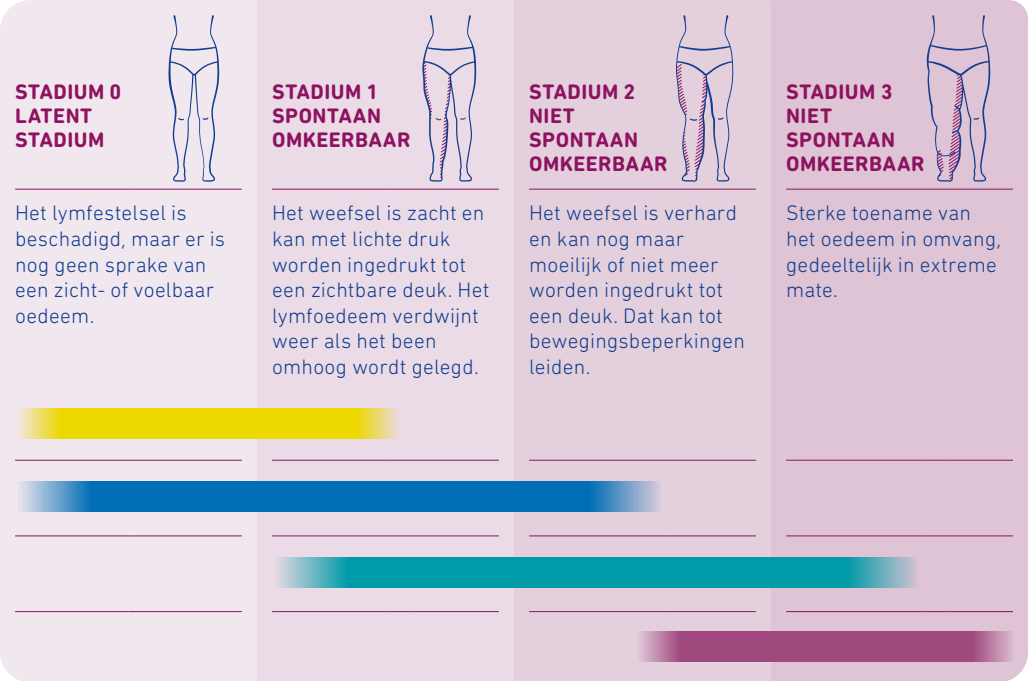
PRODUCTAANBEVELING**

VenoTrain® impuls
rondgebreed

VenoTrain® delight
vlakgebreed

VenoTrain® curaflow
vlakgebreed

VenoTrain® curaflow strong
vlakgebreed



LIPOEDEEM

morfologie***

toestand

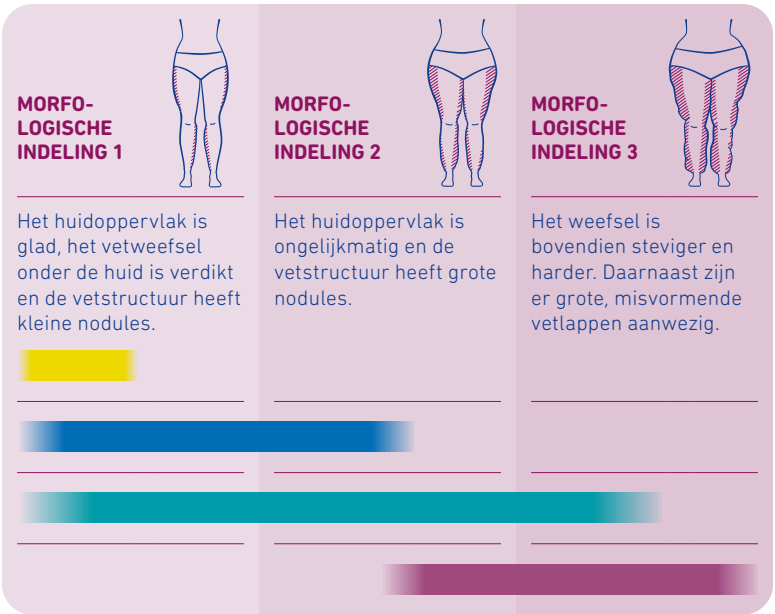
PRODUCTAANBEVELING**

VenoTrain® impuls
rondgebreed

VenoTrain® delight
vlakgebreed

VenoTrain® curaflow
vlakgebreed

VenoTrain® curaflow strong
vlakgebreed



COMPRESSIEKLASSEN**

Ccl 1: 18–21 mmHg • lichte compressie • behandeling van beginnende lymfoedemen, inactiviteitsoedeem	Ccl 2: 23–32 mmHg • gematigde compressie • gematigde oppervlaktewerking • behandeling van primaire en secundaire lymfoedemen aan het been stadium 1 en 2, lipoedemen, lipoedeem met secundair lymfoedeem	Ccl 3: 34–46 mmHg • krachtige compressie • krachtige oppervlaktewerking • behandeling van primaire en secundaire lymfoedemen aan het been stadium 2 en 3, lipoedemen, lipoedeem met secundair lymfoedeem	Ccl 4: vanaf 49 mmHG • extra krachtige compressie • behandeling van primaire en secundaire lymfoedemen aan het been stadium 2 en 3, lipoedemen en lipoedeem met secundair lymfoedeem
--	---	---	---

* schematische weergave
** Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor een volledig overzicht van de indicaties en contra-indicaties van onze producten!
*** Geen indeling in stadia op basis van de nieuwe richtlijn over lipoedeem. (Bron: richtlijn op basis van formele consensus over lipoedeem: AWMF [Duitse koepelorganisatie voor medische verenigingen]-registernummer 037-012, versie van 2024)

VenoTrain® impuls

Krachtig bij beginnende lymfoedemen en lipoedemen



Richtlijnen voor verzorging



TABEL MET CONFECTIEMATEN V6+

		OMVANG		I		II		III		IV		V		VI	
		NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS	NORMAAL	PLUS
lengte cT	85–108	cT		67–89	71–91	73–111	75–115	76–118	79–119	82–127	84–129	86–136	91–138	96–140	102–145
lengte cH	76–98	cH		85–102		87–116		92–121		98–132		104–140		110–146	
type	AT														
lengte cG		cG		45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
short	62–70	cF		39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
long	70–80														
type	AG AT	cE		32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
lengte cD		cD		28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
		cC		29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
short	35–40	cB1		23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
long	40–44														
type	AD														
		cB		19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
		cY		25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
		cA		19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	

alle gegevens in centimeter (cm)

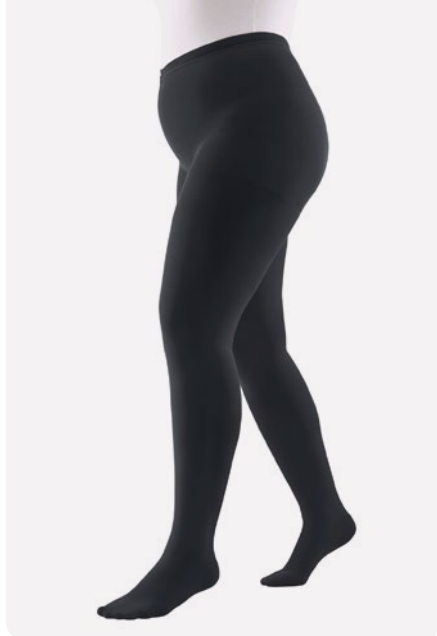
alle gegevens in centimeter (cm)



Kniekous (AD) met gesloten teenstuk in de kleur marine



Dijkous (AG) met open teenstuk in de kleur caramel



Panty (AT maatwerk) met gesloten teenstuk in de kleur antraciet

EIGENSCHAPPEN

- garandeert al bij lichte spierbeweging een hoge werkdruk dankzij het elastische breiwerk met korte rek
- hoog draagcomfort door ademend en huidvriendelijk microvezelmateriaal
- gemakkelijk aan en uit te trekken dankzij de ruime Easy-hiel
- optimale pasvorm dankzij het sterk gedifferentieerde maatsysteem V6+ (I–VI)
- expressproductie van maatwerk in de kleur caramel

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen: V6+ (I–VI)

Compressieklassen:

Ccl 2 (23–32 mmHg)

Ccl 3 (34–46 mmHg)

Teenstuk: open, gesloten

Opties: zie prijslijst

MATERIAALSAMENSTELLING

Ccl 2: 80% polyamide, 20% elastaan

Ccl 3: 75% polyamide, 25% elastaan

Kleuren:

Standaardkleuren

CARAMEL



MARINE



ANTRACIET



ZWART



Fashion colors

IRISH GREEN



FRENCH LAVENDER



● CONFECTIEMATEN
▲ MAATWERK

	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
BOORD						
SILICONENBOORD						
Tricotrand / tailleband*	● ▲			● ▲	▲	▲
Noppen	● ▲	● ▲				
Heupbevestiging			● ▲			

* bij AT in confectioniematen

experts.bauerfeind.com/venotrain-impuls

Lymfoedeem stadium 0	Lymfoedeem stadium 1 Lipoedeem morfologische indeling 1	Lymfoedeem stadium 2 Lipoedeem morfologische indeling 2	Lymfoedeem stadium 3 Lipoedeem morfologische indeling 3
----------------------	--	--	--

VenoTrain® delight

Voor een intensieve therapie



Het model draagt de dijkousen (AG) in de kleur caramel

Richtlijnen voor verzorging



Voet recht gesloten

Noppensiliconenband (AD) in de kleur caramel

EIGENSCHAPPEN

- ondersteunt de veneuze bloedstroom dankzij dieptewerking
- zorgt voor optimale ventilatie door ademend breiwerk met rek in de dwars- en lengterichting
- speciale gripRelief®-structuur van de boord biedt comfortabele en goede steun
- zit aangenaam dankzij de extra vlakke naden

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen: confectiematen en maatwerk

Compressieklassen:

- Ccl 2 (23–32 mmHg)
- Ccl 3 (34–46 mmHg)

Teenstuk: open, gesloten, schuin open

Opties: zie volgende pagina's en prijslijst

MATERIAALSAMENSTELLING

- Ccl 2: 80% polyamide, 20% elastaan
- Ccl 3: 79% polyamide, 21% elastaan

Kleuren:

Standaardkleuren

CARAMEL

ZWART



● CONFECTIEMATEN

▲ MAATWERK

									
BOORD	AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG
SILICONENBOORD									
Tricot	● ▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Noppen (3 cm)	● ▲								
Noppen (5 cm)	● ▲	▲	▲					▲	▲
Heupbevestiging			▲						
TEENSTUK									
open	● ▲	▲	▲	▲					
gesloten	● ▲	▲	▲	▲					
schuin open	● ▲	▲	▲	▲					
OPTIE									
T-hiel	● ▲ *	▲ *	▲ *	▲					
visco-elastische pelotten	▲ *	▲ *	▲ *						

* optioneel met T-hiel of pelotten

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight

Lymfoedeem stadium 0	Lymfoedeem stadium 1 Lipoeedeem morfologische indeling 1	Lymfoedeem stadium 2 Lipoeedeem morfologische indeling 2	Lymfoedeem stadium 3 Lipoeedeem morfologische indeling 3
----------------------	---	---	---

OPTIES VOOR BEEN EN VOET

VenoTrain® delight

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Heupbevestiging 	• Patiënten die siliconenboord niet verdragen	• biedt ondersteuning • garandeert dat het hulpmiddel lange tijd goed blijft zitten
Schuine voet 	• oedemateuze wreef • verkeerde teenstanden • aandoeningen van huid en nagel bij de tenen	• benodigde drukverdeling bij de basisgewrichten van de tenen • anatomische pasvorm • distale bevestiging • zorgt ervoor dat de voet niet rondom afgekneld wordt en dat er geen oedeem ontstaat aan de voorvoet
Rechte voet (gesloten) 	• oedemateuze wreef • verkeerde teen- en voetstanden • smalle, conische voet richting hiel	• het breiwerk bij de voet verschuift niet naar achteren • vermijdt opstuwing rond de tenen • zeer goed te verdragen, zacht teenstuk
T-heel 	• huidplooiën bij Y • geprononceerde anatomische hiel • overwegend zittend werk	• geen plooivorming bij hiel en wreef • verbeterd compressieverloop rondom de enkel • betere gewrichtsfunctie
Pelotte 	• oedemen en verhardingen rondom de enkel • afhankelijk van de indicatie	• verhoging van de puntdruk • voorkomen van oedemen en verhardingen • vermindert fibrose



VenoTrain® curaflow

De compressiekous voor de behandeling van lymfoedemen en lipoedemen aan het been

instructievideo
experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-bein

Het model draagt een dijkous (AG) met noppensiliconenband in de kleur Irish Green

Richtlijnen voor verzorging



Dijkous (AG) met open teenstuk in de kleur caramel

Panty (AT) met tailleband in de kleur caramel

EIGENSCHAPPEN

- maakt het aantrekken gemakkelijker dankzij soepel microvezel
- is ademend en klimaatregulerend dankzij huidvriendelijk materiaal op basis van microvezel
- biedt een hoog draagcomfort dankzij vlakke naden voor gevoelige huid
- verbetert het comfort met een extra zacht teenstuk
- garandeert optimale bewegingsvrijheid door een anatomisch gevormde, extra zachte knieholte
- heeft een prima pasvorm door maatwerk voor individuele behoeften

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen: op maat

Compressieklassen:
Ccl 1 (18–21 mmHg) tot
Ccl 4 (vanaf 49 mmHg)

Teenstuk: open, schuin open, gesloten, schuin gesloten

Opties: zie volgende pagina's en prijslijst

MATERIAALSAMENSTELLING

Beenkousen:
Ccl 1–2: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 3: 70% polyamide, 30% elastaan
Ccl 4: 69% polyamide, 31% elastaan

Teenstuk naadloos:
Ccl 1: 87% polyamide, 13% elastaan
Ccl 2: 85% polyamide, 15% elastaan
Ccl 3: 86% polyamide, 14% elastaan

Teenstuk met naad:
Ccl 1–2: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 3: 70% polyamide, 30% elastaan

Kleuren:

Standaardkleuren



Speciale kleuren



Kleureffecten*

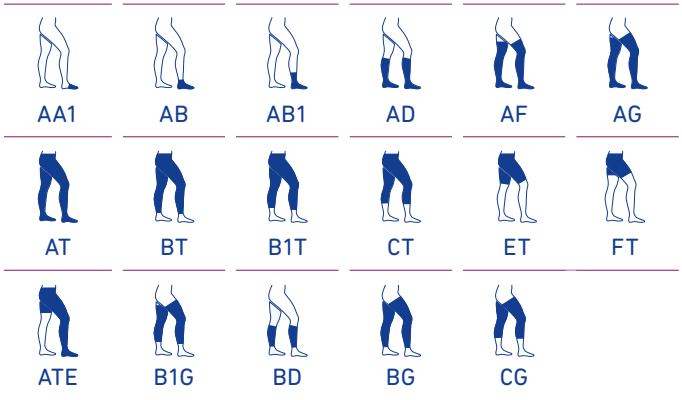


Trendy kleuren



* Kleureffect is niet verkrijgbaar voor teenkappen

MAATWERK



experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

VenoTrain® curaflow

WE ARE MORE. WE ARE CURAFLOW.

Meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

BLACK FIRE

BLACK WATER

Ontdek de elegante vlakbreicompressie met de nieuwe kleureffecten **Black Water** en **Black Fire**.



Onze populaire curaflow:
zacht aan de buitenkant, sterk aan de binnenkant en niet zomaar een vlakgebreide kous.

Elke dag wordt meer de moeite waard als je je gezonder voelt. Het drukke dagelijkse leven is echter niet altijd gemakkelijk voor patiënten. In hun strijd tegen pijn en beperkte mobiliteit krijgen ze vaak te maken met vooroordelen, spottende opmerkingen en uitsluiting.

Maar een eerste indruk vertelt lang niet alles.

Hetzelfde geldt voor onze nieuwe kleureffecten **Black Water** en **Black Fire**. Een kous die op eerste gezicht gewoon zwart lijkt te zijn, onthult een ware kleurenpracht wanneer je beter kijkt. Bij dit innovatieve tweekleurige breiwerk ontstaan er, afhankelijk van hoe hard de kous uitgerekt is, verschillende kleurcontrasten op het lichaam.

Dankzij deze toevoeging aan ons portfolio bieden we patiënten met lymfoedemen en lipoedemen compressiekousen met net dat tikkeltje extra.

**WE ARE MORE.
WE ARE CURAFLOW.**

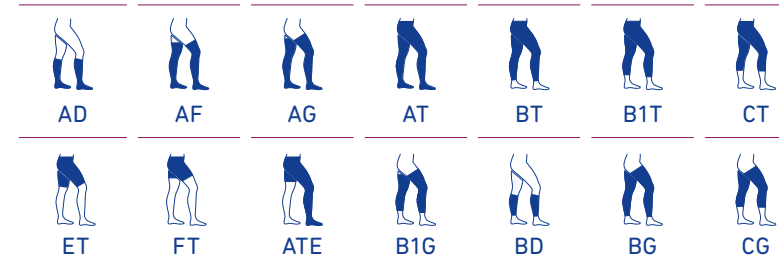


reddot winner 2025


De kleureffecten black water en black fire zijn verkrijgbaar voor VenoTrain curaflow in de volgende uitvoeringen:

MAATWERK

Been



Arm

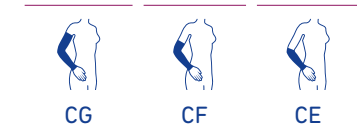

experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Lymfoedeem stadium 0

Lymfoedeem stadium 1
Lipoedeem morfologische indeling 1

Lymfoedeem stadium 2
Lipoedeem morfologische indeling 2

Lymfoedeem stadium 3
Lipoedeem morfologische indeling 3

VenoTrain® curaflow strong

Meer power voor de behandeling van oedemen



instructievideo
experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-bein



Het model draagt de dijkous (AG) met noppen siliconenband in de kleur wild berry

Richtlijnen voor verzorging





Tricotrand bij kniekous (AD)

Kniezone bij dijkous in de kleur caramel

EIGENSCHAPPEN

- biedt betrouwbare wandstabiliteit voor een extra doeltreffende oedeembehandeling
- is geschikt om grote verschillen in omtrek te overbruggen
- maakt optimale compressie mogelijk dankzij hoge werkdruk
- garandeert een hoog draagcomfort dankzij vlakke naden voor gevoelige huid
- is nóg comfortabeler door het extra zachte teenstuk
- maakt onbeperkte bewegingsvrijheid mogelijk dankzij de anatomisch gevormde, extra zachte knieholte
- heeft een prima pasvorm door maatwerk voor individuele behoeften

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen: op maat

Compressieklassen:

Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Teenstuk: open, schuin open, gesloten, schuin gesloten

Opties: zie volgende pagina's en prijslijst

MATERIAALSAMENSTELLING

Ccl 2: 87% polyamide, 13% elastaan

Ccl 3: 83% polyamide, 17% elastaan

Kleuren:

Standaardkleuren

CARAMEL

MARINE

ANTRACIET

ZWART

Speciale kleuren

CRÈME

ESPRESSO

ROYAL

Trendy kleuren

IRISH GREEN

FRENCH LAVENDER

TOSCANA RED

WILD BERRY

MAATWERK



experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Lymfoedeem stadium 0

Lymfoedeem stadium 1
Lipoedeem morfologische indeling 1

Lymfoedeem stadium 2
Lipoedeem morfologische indeling 2

Lymfoedeem stadium 3
Lipoedeem morfologische indeling 3



OPTIES VOOR BEEN EN VOET

VenoTrain® curaflow en VenoTrain® curaflow strong


VenoTrain curaflow en VenoTrain curaflow strong worden op maat gemaakt om de producten individueel aan te kunnen passen aan de behoeften van de patiënt. De hier getoonde productopties zijn het meest gekozen.

In totaal zijn er meer dan 1000 productcombinaties mogelijk in ons omvangrijke maatprogramma. Meer opties vindt u in onze actuele prijslijsten.

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Schuine voet (gesloten) 	- oedemateuze wreef - verkeerde teen- en voetstanden	- benodigde drukverdeling bij de basisgewrichten van de tenen - anatomische pasvorm - het breiwerk bij de voet verschuift niet naar achteren - vermijdt opstuwing rond de tenen - zeer goed te verdragen, zacht teenstuk
Rechte voet (gesloten) 	oedemateuze wreef bij relatief rechte teenlijn	- het breiwerk bij de voet verschuift niet naar achteren - vermijdt opstuwing rond de tenen - zeer goed te verdragen, zacht teenstuk
Schuine voet (open) 	- oedemateuze wreef - verkeerde teenstanden - aandoeningen van huid en nagel bij de tenen	- benodigde drukverdeling bij de basisgewrichten van de tenen - anatomische pasvorm - distale bevestiging - zorgt ervoor dat de voet niet rondom afgekneld wordt en dat er geen oedeem ontstaat aan de voorvoet
Rechte voet (open) 	bij doorsnee anatomie van de tenen en tenen in een rechte lijn	voor meer luchtcirculatie rond de voorvoet

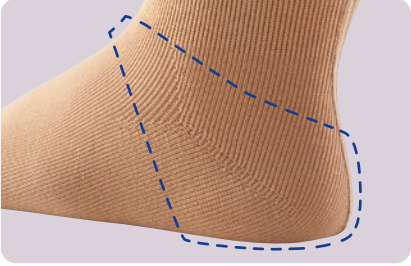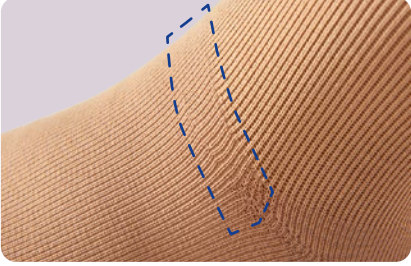WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Hallux 	Scheefstand van de grote teen (hallux valgus)	- optimale pasvorm in het hallux-gebied - drukontlasting
90°-hiel 	- huidplooien bij Y - geprononceerde anatomie van de hiel, wanneer de malleoli of achillespees niet zichtbaar is - rolstoelgebruikers en overwegend zittend werk - om dagelijkse activiteiten uit te voeren	- geen plooivorming bij hiel en wreef - verbeterd compressieverloop rondom de enkel - betere gewrichtsfunctie
Meer wreefwijdte 	- overhangende huidplooi bij Y - hoge wreef - lymfoedeem stadium einde 2 / begin 3	- minder druk op de pezen bij dorsiflexie - verbeterd compressieverloop bij de wreef
Naadloze teenkap (alleen VT curaflow) 	- voorvoet- en tenen-lymfoedemen - wreefoedemen	- voorkomen van oedemen rondom de voorvoet en de tenen - betere acceptatie dankzij comfortabele uitsparing bij de kleine teen
Teenkap (alleen VT curaflow) 	- voorvoet- en tenen-lymfoedemen - wreefoedemen	- voorkomen van oedemen rondom de voorvoet en de tenen - betere acceptatie dankzij comfortabele uitsparing bij de kleine teen
Teenkap met ringen (alleen VT curaflow) 	- voorvoet- en tenen-lymfoedemen - wreefoedemen	voorkomen van oedemen rondom de voorvoet en de tenen

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Tenen vastgenaaid aan de kous (alleen VT curaflow)		
	• voorvoet- en tenen-lymfoedemen • Wreefoedemen	• voorkomen van oedemen rondom de voorvoet en de tenen • geen overlapping van kous en teenstuk
Pelotte ingewerkt		
	• oedemen en verhardingen rondom de enkel	• verhoging van de puntdruk • voorkomen van oedemen en verhardingen
Lymfepad met voering		
	• lokaal verdikt oedeem of verharding • afwijkingen van de anatomische standaard	• verhoging van de puntdruk door lymfepad met ribbels en noppen • voorkomen van oedemen en verhardingen
Voering		
	• huidirritaties rond de buigzones, zoals het enkelgewricht en de knie, en dunne, kwetsbare huid.	• beschermt gevoelige huid tegen overbelasting • minder wrijving en mechanische belasting • bevestiging van pelotten
Functiezone standaard bij alle beenkousen aan de knie		
	• bij patiënten met een lymfoedeem of lipoedeem	• extra zachte knieholte voor verminderde plooivorming • anatomische vorm voor betere gewrichtsfuncties
Boord schuin aan de knie		
	• aanbevolen bij patiënten met een lymfoedeem of lipoedeem • conische anatomische vorm • zacht huidweefsel	• verbeterd compressieverloop bij het eind van de kous (AD) • anatomische pasvorm

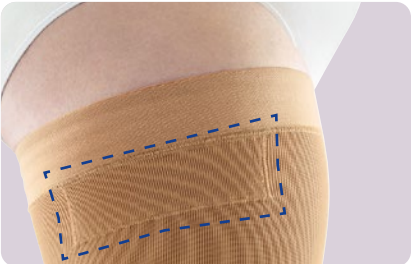WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Boord schuin aan het dijbeen		
	• aanbevolen bij patiënten met een lymfoedeem of lipoedeem • conische anatomische vorm • zacht huidweefsel	• voorkomt dat de lymfevaten rondom afgekneld raken • verbeterd compressieverloop bij het eind van de kous (AG) • anatomische pasvorm
Beenverlenging voorzijde enkel in combinatie met schuine boord mogelijk		
	• Patiënten die een volumineus bovenbeen met een uitgesproken oedeem hebben	• voorkomt afknellen • fysiologisch drukverloop tot aan de lies
Siliconenboord		
	• geprononceerde conische beenvorm • zeer zacht weefsel	• extra houvast
Inzetstuk heren standaard		
	• panty's voor de behandeling van heren	• verbeterde pasvorm van het broekgedeelte

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Stoma-opening 	• abdomen	• voorzien van een opening voor externe afvoer- en toevoerslangen
ATU-kruisinzet 	• Zwangerschap	• verbeterde pasvorm van het broekgedeelte • minder compressie aan het broekgedeelte
Heupbevestiging 	• Patiënten die siliconenboord niet verdragen	• houdt de compressiekous op haar plaats
Rits 	• bij grote verschillen in omvang tussen heup en taille • bij lichamelijke en gezondheidsgelateerde beperkingen, zoals slappe parese, artrose, reumatische veranderingen in de vingers / handen of incontinentie	• maakt het aan- en uitdoen van het hulpmiddel gemakkelijker

SOORTEN KRUISINZETTEN

Kruisinzet standaard zonder ondergoedbeschermer



Dit is de standaardversie, die met een enkele laag stof zeer geschikt is voor het gebruik van hygiëneproducten en voorkomt dat het hulpmiddel in de huid snijdt bij de intieme zone.

Kruisinzet standaard met ondergoedbeschermer



Door de dubbele laag stof is er geen sprake van wrijving of irritatie rond de intieme zone. Bovendien worden zweet en afscheiding geabsorbeerd, waardoor de kans op infecties wordt verminderd.

Kruisinzet met compressie zonder ondergoedbeschermer



De prima pasvorm voorkomt dat het hulpmiddel verschuift en zorgt ervoor dat het breiwerk beter zit. Helpt genitale oedemen tot een minimum te beperken.

Kruisinzet met compressie met ondergoedbeschermer



De prima pasvorm voorkomt dat het hulpmiddel verschuift en zorgt ervoor dat het breiwerk beter zit. De dubbele laag stof voorkomt bovendien wrijving en huidirritatie rond de intieme zone.

Kruisinzet overlappend



Is geschikt voor postoperatief gebruik bij patiënten met een katheter en maakt toiletbezoeken eenvoudiger.



BEHANDELINGSSYSTEMATIEK* ARM EN HAND

Met behulp van de Bauerfeind-behandelingssystematiek vindt u de passende VenoTrain-compressiekous voor uw klanten. Bij de selectie van de compressiekous en de compressieklasse moet altijd rekening worden gehouden met de individuele situatie en behoeften van de patiënt in kwestie. Neem bij twijfel meteen contact met ons op.

LYMFOEDEEM

stadia

toestand

PRODUCTAANBEVELING**

VenoTrain® soft
rondgebreed

VenoTrain® curaflo
vlakgebreed



STADIUM 0 LATENT STADIUM

Het lymfestelsel is beschadigd, maar er is nog geen sprake van een zicht- of voelbaar oedeem.



STADIUM 1 SPONTAAN OMKEERBAAR

Het weefsel is zacht en kan met lichte druk worden ingedrukt tot een zichtbare deuk.



STADIUM 2 NIET SPONTAAN OMKEERBAAR

Het weefsel is verhard en kan nog maar moeilijk of niet meer worden ingedrukt tot een deuk.



STADIUM 3 NIET SPONTAAN OMKEERBAAR

Sterke toename van het oedeem in omvang, gedeeltelijk in extreme mate.

LIPOEDEEM

morfologie***

toestand

PRODUCTAANBEVELING**

VenoTrain® soft
rondgebreed

VenoTrain® curaflo
vlakgebreed



MORFOLOGISCHE INDELING 1

Het huidoppervlak is glad, het vetweefsel onder de huid is verdikt en de vetstructuur heeft kleine nodules.



MORFOLOGISCHE INDELING 2

Het huidoppervlak is ongelijkmatig en de vetstructuur heeft grote nodules.



MORFOLOGISCHE INDELING 3

Het weefsel is bovendien steviger en harder. Daarnaast zijn er grote, misvormende vetlapen aanwezig.

COMPRESSIEKLASSEN**

Ccl 1: 15–21 mmHg
• lichte compressie

Ccl 2: 23–32 mmHg
• gematigde oppervlaktewerking
• behandeling van primaire en secundaire lymfoedemen aan de arm stadium 1 en 2, lipoedemen, lipoedeem met secundair lymfoedeem

Ccl 3: 34–46 mmHg
• krachtige oppervlaktewerking
• behandeling van primaire en secundaire lymfoedemen aan de arm stadium 2 en 3, lipoedemen, lipoedeem met secundair lymfoedeem

* schematische weergave
** Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor een volledig overzicht van de indicaties en contra-indicaties van onze producten!
*** Geen indeling in stadia op basis van de nieuwe richtlijn over lipoedeem. (Bron: richtlijn op basis van formele consensus over lipoedeem: AWMF [Duitse koepelorganisatie voor medische verenigingen]-registernummer 037-012, versie van 2024)

VenoTrain® soft armkous

Bewegingsvrijheid in het dagelijks leven



Het model draagt de armkous (CG) met noppensiliconenband in de kleur beige

Richtlijnen voor verzorging



Functionele zone aan de binnenkant van de elleboog in de kleur beige



Tricotrand in de kleur beige

EIGENSCHAPPEN

- zorgt voor meer bewegingsvrijheid, meer draagcomfort en minder drukgevoel door de comfortabele zone aan de binnenkant van de elleboog
- merkbare werking gedurende de gehele draagduur
- huidvriendelijk, zacht en ademend

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen:
VenoTrain soft arm (S–XL)

Compressieklassen:
Ccl 1 (15–21 mmHg)
Ccl 2 (23–32 mmHg)

MATERIAALSAMENSTELLING

Ccl 1: 74% polyamide, 26% elastaan
Ccl 2: 69% polyamide, 31% elastaan

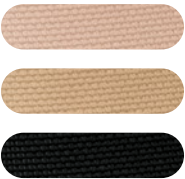
Kleuren:

Standaardkleuren

BEIGE

CARAMEL

ZWART



● CONFECTIEMATEN

BOORD
SILICONENBOORD



CG

Tricotrand



Noppen



experts.bauerfeind.com/venotrain-soft-arm

VenoTrain® curaflow

De compressiekous voor de behandeling van lymfoedemen en lipoedemen aan arm en hand

instructievideo
experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-arm





Het model draagt de armkous (CG) en de naadloze handschoen (AC1) in de kleur toscana red

Richtlijnen voor verzorging





Handschoen (AC1) zonder naad met open vingertoppen in de kleur royal

Armkous (CG) in de kleur caramel

EIGENSCHAPPEN

- maakt het aantrekken gemakkelijker dankzij soepel microvezel
- is ademend en klimaatregulerend dankzij huidvriendelijk materiaal op basis van microvezel
- biedt een hoog draagcomfort dankzij vlakke naden voor gevoelige huid
- garandeert optimale bewegingsvrijheid door een anatomisch gevormde, extra zachte elleboog
- heeft een prima pasvorm door maatwerk voor individuele behoeften

BESTELMOGELIJKHEDEN

Maatsystemen: op maat

Compressieklassen:
Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Opties: zie volgende pagina's en prijslijst

MATERIAALSAMENSTELLING

Arm:
Ccl 1: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 2: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 3: 73% polyamide, 27% elastaan

Hand naadloos:
Ccl 1: 87% polyamide, 13% elastaan
Ccl 2: 85% polyamide, 15% elastaan
Ccl 3: 86% polyamide, 14% elastaan

Hand met naad:
Ccl 1: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 2: 79% polyamide, 21% elastaan
Ccl 3: 70% polyamide, 30% elastaan

Kleuren:

Standaardkleuren

- CARAMEL
- MARINE
- ANTRACIET
- ZWART

Speciale kleuren

- CRÈME
- ESPRESSO
- ROYAL

Kleureffecten*

- BLACK WATER
- BLACK FIRE

Trendy kleuren

- IRISH GREEN
- FRENCH LAVENDER
- TOSCANA RED
- WILD BERRY

* Kleureffect is niet verkrijgbaar voor handkousen

MAATWERK

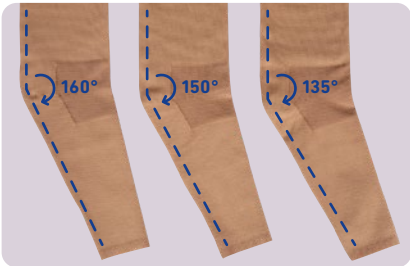


OPTIES

voor arm en hand

De VenoTrain curaflow wordt op maat gemaakt, zodat het product aangepast kan worden aan de individuele behoeften van de gebruiker. De hier getoonde productopties zijn het meest gekozen. In totaal zijn er meer dan 1000 productcombinaties mogelijk in ons omvangrijke maatprogramma.

Meer opties kunt u terugvinden in onze actuele prijslijst of bestellen in de Bauerfeind-onlineshop.

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Functiezone Standaard voor alle armkousen		
	aanbevolen bij patiënten met een lymfoedeem of lipoedeem	- geïntegreerde functionele zone ter voorkoming van vouwen - anatomische vorm voor betere gewrichtsfuncties
Elleboog 160°, 150° of 135°		
	160°: standaardversie 150°: voortdurend bezig met een gebogen elleboog 135°: patiënten die hun elleboog niet meer volledig kunnen strekken	minder vouwen bij de buigzone en dus geen last van afknellen
Schuine boord		
	- voornamelijk bij patiënten met een lymfoedeem of lipoedeem - anatomische vorm - zacht huidweefsel	- verbeterd compressieverloop bij het eind van de kous - anatomische pasvorm - voorkomen van circulaire afknellingen

WAT? OPTIES	WANNEER? INDICATIES	HOE? WERKINGSMECHANISMEN
Siliconenboord		
	- bij erg zacht weefsel - geprononceerde conische armvorm	- extra houvast - voorkomt glijden
Rits		
	- bijkomende aandoeningen zoals reuma, artritis enz. - bij slappe parese	voor gemakkelijker aan- en uitdoen van het hulpmiddel
Lymfepad ingewerkt		
	- lokaal verdikt oedeem of verharding - afwijkingen van de anatomische standaard	- verhoging van de puntdruk - voorkomen van oedemen en verhardingen
Handschoen naadloos		
	- lichte tot middelzware vinger-oedemen - lichte tot middelzware oedemen op de handrug	voorkomen van oedemen in vingers en handrug
Handschoen met naad		
	- middelzware tot geprononceerde vinger-oedemen - middelzware tot geprononceerde oedemen op de handrug	voorkomen van oedemen in vingers en handrug

ACCESSOIRES VOOR VenoTrain® DE PERFECTE AANVULLING VOOR DAGELIJKS GEBRUIK



VenoTrain® - HUIDVERZORGING WELLNESS VOOR DE HUID

De huid moet bij uw klant nu ook op de eerste plaats staan. Bij lymfoedemen of lipoedemen is de huid immers doorgaans wat gevoeliger. Verzorgende crèmes voorkomen dat de huid uitdroogt en zorgen voor de nodige bescherming. Om ervoor te zorgen dat de huid soepel en mooi blijft, hebben we twee hoogwaardige verzorgingsproducten ontwikkeld die optimaal zijn afgestemd op een huid die op de proef gesteld wordt door oedemen en compressie.



VenoTrain® - LOTION

De verwennende verzorging voor 's avonds

Na een lange dag in een compressieproduct verdient de huid een kleine wellnessbehandeling. Onze verzorgingslotion, die ontwikkeld is in samenwerking met Sebapharma, is perfect daarvoor. Haar speciale kamille-extract verwent de huid, vermindert huidirritaties en zorgt voor heerlijk ontspannen benen en armen.



BAUERFEIND- VERZORGINGSSCHUIM

De snelle verzorging voor 's ochtends

Licht verzorgingsschuim dat de huid beschermt en voedt met panthenol. Dit schuim trekt snel in de huid en kan gebruikt worden vóór het aantrekken van het compressieproduct.



01



02



03



04



05 Afbeelding is louter illustratief



06

ACCESSOIRES VOOR Venotrain®

De accessoires van de Venotrain-serie zorgen ervoor dat patiënten zich prettig voelen in hun Venotrain-compressiekousen. Ze maken het gebruik eenvoudiger en verzorgen de compressiekousen en de huid van uw klanten.

- 01 Meetzakje**
om te helpen bij het opmeten: meetlint voor vingers, kohlpotlood, slijper, meetlint, speciale handschoenen om de compressiekousen eenvoudig aan te trekken, Venotrain glider, balpen
- 02 Viltten meetzakje klein***
om te helpen bij het opmeten: meetlint voor vingers, kohlpotlood, slijper, meetlint

- 03 Wasnet**
veilige verzorging van compressiekousen bij elke wasbeurt in de machine
- 04 Speciale handschoenen van Bauerfeind**
helpen om de compressiekousen correct aan te trekken
- 05 Startpakket**
nuttige set ter ondersteuning bij het dagelijkse dragen van compressiekousen (bijv. handschoenen, wasnet, klantenpas)

- 06 Venotrain-wasmiddel**
reinigt zacht, biedt een milde verzorging en zorgt voor langdurige bescherming

*alleen in bepaalde landen verkrijgbaar

Venotrain® glider COMPACTE AANTREKHULP

KAN VOOR-
GESCHREVEN
WORDEN

De Venotrain glider is een praktische aantrekhulp voor medische compressiekousen en kan door de arts worden voorgeschreven.

Het stevige, lichte materiaal laat de kous zonder moeite over uw arm of been glijden. Ze is geschikt voor compressiekousen met open en gesloten teenstuk.

Ze bespaart tijd en neemt weinig ruimte in beslag en is dus ideaal voor onderweg.

- KENMERKEN**
- gebruiksvriendelijke tool die het aantrekken van compressiekousen vereenvoudigt
 - ook ideaal voor onderweg dankzij het extreem lichte ontwerp
 - veilig in gebruik dankzij stevig en scheurbestendig materiaal
 - verkrijgbaar op voorschrift

DE FILMPJES OVER HET
AANDOEN VINDT U OP:
[experts.bauerfeind.com/
venotrain-glider](https://experts.bauerfeind.com/venotrain-glider)





EXTRA OPTIES WIJZIGINGEN | REPARATIES INDIVIDUELE KLANTENSERVICE

WIJZIGINGEN | REPARATIES

● CONFECTIEMATEN

		soft Arm	impuls Been
Bovenste kousrand	Siliconenboord vernieuwen	●	●
	Tricotrand in siliconenboord	●	●
	Siliconenboord	●	●
	Heupstuk verwijderen en siliconenboord aannaaien		●
AGHB	Heupgordel vernieuwen		●
Kous inkorten	AD / CG max. met 3 cm	●	●
	AG max. met 5 cm		●
Reparatie, voor zover mogelijk	Gat	●	●
	Ladder	●	●
	Naad	●	
	losse draad	●	●

NIEUWE BESTELLING

▲ MAATWERK

	Eenheid	impuls
Breiwerk teenstuk verlengen of inkorten	per stuk	▲
Teenstuk Naad naar buiten verplaatst	per stuk	▲
Teenstuk breder, smaller, anatomisch	per stuk	▲
Broekgedeelte voorzijde / achterzijde – twee naden	per stuk	▲
AT met inzetstuk heren (zonder gulp of met verticale gulp)	per stuk	▲
AT met rijbroek-inzetstuk	per stuk	▲

WIJZIGINGEN | REPARATIES

▲ MAATWERK

		impuls Been
Bovenste kousrand	Siliconenboord vernieuwen	▲
	Tricotrand in siliconenboord	▲
	Siliconenboord nauwer of breder	▲
	Heupstuk verwijderen en siliconenboord aannaaien	▲
AT	Broekgedeelte verkorten	▲
	Broekgedeelte verlengen (behalve ATX)	▲
	Kruisinzet nauwer maken (behalve ATX)	▲
	Kruisinzet breder maken (behalve ATX)	▲
	Rijbroek-inzetstuk verlengen (behalve ATX)	▲
	AT wijzigen in AG met siliconenboord	▲
AGHB	Heupgordel vernieuwen	▲
Kous inkorten	AD max. met 3 cm	▲
	AG max. met 5 cm	▲
Verven van licht naar donker*		▲
Wijziging aan teenstuk	Teenstuk gesloten wijzigen naar open	▲
	Teenstuk open inkorten	▲
Reparatie, voor zover mogelijk	Gat	▲
	Ladder	▲
	Naad	▲
	Losse draad	▲

WIJZIGINGEN | REPARATIES

▲ VenoTrain® curaflow
● VenoTrain® curaflow strong

Wijziging	Verzorging Been	Arm
Broek		
Broek- gedeelte	Achteraf U-deel inwerken enkel bij broekgedeelte met compressie	
	Broekgedeelte verkorten	
	Stoma-opening in broekgedeelte inwerken	▲
	Tailleafsluiting	
	Kruisinzet	
Rits inwerken	▲	
AT in AG met heupbevestiging	▲	
AT in CT, ET of FT	▲	
AT in AG met siliconenboord	▲	
Been / arm		
Kous inkorten (vastgenaaide boord)	▲●	▲
Siliconenboord / tailleband / band		
	Nieuwe siliconenboord innaaien	
	Nieuwe siliconenboord / tailleband aannaaien	
	Siliconenboord max 5 cm nauwer of breder	
	Heupbevestiging wijzigen in AG met siliconenboord	▲
	Schouderkap wijzigen in CG met siliconenboord	
	Nieuwe gordel voor heupbevestiging / schouderkap (slijtage)	
Aannaaien heupbevestiging aan beenkousen tot G	▲	
ALannaaien schouderkap aan CG		▲
lymfepad / voering	▲	▲
Afwerking	▲	▲
Voet (per voet)		
Wijzigingen teenstuk / wijziging voettengte	▲●	
cA-maat kleiner maken	▲●	
Siliconenboordstukken bij cA innaaien	▲●	
Wijzigingen hand		
Handschoen inkorten / versmallen (enkel handschoenen met naad)		▲
Achteraf lymfepad inwerken / wijzigen		▲
Rreparaties / wijzigingen		
Reparatie naad	▲●	▲
Reparatie ladder	▲●	▲
Reparatie gat en losse draden	▲●	▲

*Gelieve de kousen **niet** te passen: na contact met de huid is verven niet meer mogelijk

BESTELBLOCNOTES

Onze speciale bestelblocnotes vereenvoudigen uw dagelijkse werk!

De verschillende bestelformulieren zijn uiteraard ook altijd beschikbaar op onze pagina met downloads:

bauerfeind-group.com/en/service/downloads

OVERIG BAUERFEIND-ASSORTIMENT



VENOTRAIN-COMPRESSIEKOUSEN (rondbrei) blinken uit dankzij hun unieke materiaaleigenschappen. Ze verbeteren de werking van de aders en voorkomen veneuze aandoeningen aan de benen. Als medische compressiekousen voor lichte tot gevorderde veneuze aandoeningen, maar ook als steunkousen voor het werk of tijdens het reizen: het VenoTrain-assortiment heeft altijd een geschikte kous. Dankzij een grote selectie aan kleuren en patronen zijn de kousen ook nog eens erg modieus.



De voeten zijn de basis van het lichaam. **ORTHOPEDISCHE STEUNZOLEN** ontlasten zowel de voeten, knie- en heupgewrichten als de rug. Ze ondersteunen de voet in zijn natuurlijke werking en kunnen zo een positieve invloed hebben op het biomechanisme van het lichaam. Omdat niet elke voet dezelfde soort ondersteuning vereist, biedt Bauerfeind meer dan 300 verschillende modellen.

BANDAGES EN ORTHESEN van Bauerfeind helpen na blessures evenals bij acute en chronische orthopedische aandoeningen. Ze verbeteren het stabiliteitsgevoel en zorgen dat de patiënt zich veilig voelt in zijn of haar dagelijkse leven en bij het sporten. Om de bewegings-therapie optimaal te ondersteunen worden de bandages en orthesen gemaakt van lichte en ademende materialen. Dankzij innovatieve oplossingen zoals snelsluitingen en geïntegreerde aantrekulpen zijn ze eenvoudig in gebruik voor het dagelijks leven en overtuigen ze met uitmuntende 'Made in Germany'-kwaliteit.

Een overzicht van het volledige assortiment vindt u online op: experts.bauerfeind.com

BAUERFEIND AG VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN)

Prijzen
De vermelde prijzen zijn de nettoprijzen in euro af fabriek exclusief wettelijke btw.

Verzending
De verzending is op risico en op kosten van de koper, ook wanneer de koper de verzendkosten niet zelf betaalt. Bij operationele storingen die ons of om het even wie van onze leveranciers treffen, een tekort aan geschikt personeel, staking, uitsluiting en overmacht zijn we gerechtigd om de levering uit te stellen en zijn we ontheven van elke leveringsverplichting zolang de hinder duurt.

Verzendkosten
Voor de verzending brengen we een vast tarief in rekening van 7,00 EUR voor bestellingen met een totale nettobestelwaarde tot 50,00 EUR en 4,00 EUR voor bestellingen met een totale nettobestelwaarde tot 200,00 EUR. We brengen geen verzendkosten in rekening wanneer de bestelling op maat gemaakte goederen bevat. Leveringen met speciale vereisten gebeuren tegen een kostprijs.

Retourzendingen
Retourzendingen buiten de retourgarantie worden enkel aanvaard na voorafgaande aankondiging en toestemming van ons, op voorwaarde dat de oorspronkelijke leveringsdocumenten worden verstrekt. De geretourneerde goederen worden verondersteld in goede staat te verkeren. We behouden ons het recht om de retourzending te weigeren. We brengen kosten in rekening voor het verwerken van retourzendingen, tenzij deze onder de garantie vallen. Voor retourzendingen binnen een maand na de leveringsdatum bedraagt deze kostprijs 10,00 EUR voor elke retourzending. Voor goederen die één maand of meer na de leveringsdatum worden teruggezonden, worden administratiekosten ter hoogte van 20 procent van de nettobestelwaarde in rekening gebracht, met een maximum van 25,00 EUR per artikel en stuk; voor goederen die tussen zes en twaalf maanden na de leveringsdatum worden teruggezonden, worden kosten ter hoogte van 40 procent van de netto-bestelwaarde in rekening gebracht, met een maximum van 50,00 EUR voor elk artikel en stuk.

Goederen die buiten de garantie vallen en retourzendingen 12 maanden of meer na de leveringsdatum worden niet aanvaard voor retour. Op maat gemaakte goederen kunnen niet geretourneerd worden.

Betalen
Tenzij op voorhand en schriftelijk individueel anders overeengekomen, dienen betalingen onmiddellijk na de levering te gebeuren. We bieden 4 procent korting voor betalingen via automatische incasso en 3 procent korting voor betalingen die binnen 10 dagen na de factuurdatum verricht worden. In de overige gevallen is de nettobetalingstermijn 30 dagen. De koper is in verzuim zodra er 30 dagen verstrekken zijn sinds de factuurdatum. Vanaf dan zullen eventuele bijkomende leveringen enkel tegen vooruitbetaling gebeuren. Vanaf de datum waarop de betaling achterstallig is, brengen we een vertragingsrente van acht procent boven het toepasselijke rentetarief in rekening. Betalingen per cheque, bankwissel enz. gelden als voltooid wanneer het bedrag definitief op onze rekening is bijgeschreven.

Eigendomsvoorbehoud
We behouden het eigendom van alle geleverde goederen voor tot de koper alle uitstaande bedragen onder onze zakenrelatie met hem heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud is ook proportioneel van toepassing op goederen die zijn bewerkt of anderszins gewijzigd. Indien de goederen zijn verkocht, wordt geacht dat alle vorderingen op derden ten bedrage van de totaalsom die ons verschuldigd is zonder voorbehoud worden overdragen.

Ondanks de overdracht heeft de koper het recht deze som te innen. Ons recht om de som te innen is onverlet door de voorgaande bepaling; we verbinden ons ertoe om ons te onthouden van de inning tenzij de koper in verzuim van betaling is. Indien de koper in verzuim van betaling is, kunnen we eisen dat de koper de overgedragen vorderingen en

de namen van de debiteuren bekendmaakt, dat hij alle nodige informatie verstrekt voor de inning van de schuld, dat hij alle benodigde documenten levert en dat hij de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Het is de koper niet toegestaan om de goederen te verkopen, te verpanden of als zekerheid te verstrekken. Verpanding, confiscatie of andere beschikkingen door een derde partij moeten onmiddellijk aan ons worden gecommuniceerd door de koper en deze dient ons alle nodige informatie en documenten te verschaffen, zodat we onze rechten kunnen verdedigen. We verbinden ons ertoe om, op verzoek van de koper, elke zekerheid vrij te geven voor zover die het bedrag van de verzekerde vordering die nog niet voldaan is met meer dan 20 procent overschrijdt.

Klachten
Aanspraken op garantie met betrekking tot zichtbare gebreken zijn nietig, indien we niet onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld van deze aanspraken in overeenstemming met paragraaf 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Aanspraken op garantie vervallen ook één jaar na de levering van de gekochte goederen. Indien een product gebreken vertoont, zullen we het naar onze keuze vervangen of herstellen. Om hygiëneredenen worden herstellingen uitsluitend uitgevoerd op producten die gewassen of helemaal schoon zijn. Indien we de goederen ongewassen ontvangen, behouden we ons het recht voor om een redelijke som in rekening te brengen voor extra werk. De klant kan geen korting vragen of de overeenkomst beëindigen zolang we onze verplichtingen betreffende aanvullende diensten nakomen, in het bijzonder met betrekking tot het herstel van gebreken of de levering van goederen zonder gebreken, tenzij wanneer onze aanvullende diensten niet geholpen hebben. Gebreken ten gevolge van normale slijtage, overmatig of verkeerd gebruik, een gebrek aan verzorging of het niet-respecteren van de gebruiksaanwijzing vallen niet onder de garantie.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten tenzij blijkt dat wij, onze vertegenwoordigers of tussenpersonen met grove nalatigheid of opzet hebben gehandeld. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade aan leven, lichaam of gezondheid, noch op de schending van een wezenlijke contractuele plicht.

Bevoegde rechtbank
De plaats van levering is het hoofdkantoor van ons bedrijf. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit de zakelijke relaties is die van Gera, Duitsland.

Scheidbaarheidsclausule
In het geval dat een bepaling van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijven de andere bepalingen overeind. De ongeldige bepaling dient dan vervangen te worden door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de oorspronkelijke economische bedoeling van de partijen.

Gegevensbeschermingsclausule / gespreksopname

Voor kwaliteitsdoeleinden en andere doeleinden leggen we gesprekken, faxen, e-mails en brieven tussen de koper en onze werknemers vast. Alle opnames dienen voor wettelijke doeleinden waaraan voldaan moet worden bij bestelde medische producten. De opnames worden automatisch verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De opgenomen gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit vereist is door een beslissing van de rechtbank of op verzoek van plaatselijke belastings- of gezondheidszorginstanties. De koper geeft hierbij toestemming voor dergelijke opnames.

Surf naar www.bauerfeind.de/ds voor meer informatie over de laatste versie van het Algemene Beleid inzake Gegevensbescherming van Bauerfeind AG.

Laatste update: februari 2022

PRIVACYVERKLARING:
Patiëntgegevens op bestelformulieren enz. worden door ons verwerkt in het kader van de verwerking van ordergegevens en worden binnen het kader van de wettelijke bepalingen zolang bewaard als wettelijk vereist is. Vraag hiervoor de nodige toestemming aan uw patiënten voordat u de order aan ons doorgeeft, want anders kunnen boetes opgelegd worden.

OPMERKINGEN OVER DE AANSPRAKELIJKHEID:
Alle informatie in deze brochure komt overeen met de stand van zaken op het tijdstip van het ter perse gaan. Deze brochure maakt een eerste overzicht van het vakgebied mogelijk – afhankelijk van de weergave – en stelt geselecteerde medische diagnose- /behandelingsmogelijkheden voor. De beschrijvingen zijn wetenschappelijk gefundeerd, maar zijn geenszins bedoeld als uitputtend / een weergave van alle doctrines. De volledige inhoud van deze brochure of de (ook gedeeltelijke) onlineweergave ervan, in het bijzonder met betrekking tot het stellen van diagnoses en behandelingsvormen (teksten, afbeeldingen, grafieken enz.), is bedoeld als vrijblijvende ondersteuning van de behandeling die door de arts en specialist moet worden voorgeschreven. Deze brochure vervangt niet de noodzakelijke individuele anamnese en de deskundige algemene beoordeling hiervan door een arts/specialist, met inachtneming van evt. reeds lopende behandelingen.
De inhoud van deze catalogus is uitsluitend bedoeld voor specialisten, niet voor leken en al zeker niet voor patiënten.
Vraag bij twijfel een andere deskundige om raad. Ook wij helpen u daar graag mee verder.

EEN BETERE LEVENSQUALITEIT VOOR UW KLANTEN!

Hebt u vragen, suggesties of wensen?
Neem contact met ons op:

BAUERFEIND AG

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

T +49 (0) 36628 66-2000

F +49 (0) 36628 66-2999

E info@bauerfeind.com

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS

T +31 (0) 23 531-9427

F +31 (0) 23 532-1970

E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

T +32 (0) 2 527-4060

F +32 (0) 2 792-5345

E info@bauerfeind.be